

II. CATÁLOGO DE PRUEBAS DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS

ID. 1 11-DEOXYCORTISOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—11-Deoxicortisol; c.sust.
- ☐ Sinónimos DOC
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No recomendada
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 2 17 BETA ESTRADIOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Estradiol-17B; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento No. Llevar inmediatamente al laboratorio y centrifugar. Separar el suero antes de 1 hora
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 2 años
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno En el impreso de petición hacer constar la fecha de la última regla.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 3 17-CETOSTEROIDES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de 17-oxoesteroide; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos 17-Cetos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCl 6N
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar el estrés el día de la recogida

ID. 4 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de 17-hidroxycorticosteroide; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos 17-HOCS, Cromógenos de Porter-Silver
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Como conservantes se pueden usar ácidos clorhídrico ó acético (20 mL).
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento Si está acidificado
 - Tª Ambiente 45 días
 - Refrigerado 45 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación Si se determina mediante la reacción de Porter-Silver, es necesario suprimir: acetazolamida, digitálicos, eritromicina, vitamina D, meprobamato, fenotiacinas, reserpina y tiacidas.
 - Otras consideraciones

ID. 5 17-HIDROXIPROGESTERONA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—17-Hidroxiprogesterona; c.sust.
- ☐ Sinónimos 17-Hidroxiprogesterona, 17-OH-Progesterona
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones En programas de hiperplasia adrenal congénita puede recogerse sobre papel de filtro.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento En papel de filtro puede conservarse hasta 6 meses.
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Preferible efectuar la extracción a primera hora de la mañana.

ID. 6 2,3-DIFOSFOGLICERATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—2,3-Difosfoglicerato; c.sust.
- ☐ Sinónimos 2,3 DPG
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3 o Heparina sódica
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 7 3-METOXI-4-HIDROXIFENILGLICOL (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Vanilglycol
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Contenedor orina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 8 5-HIDROXIINDOLACETICO ACIDO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de 5-hidroxiindolilacetato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos 5-HIAA
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCL ó A. acético concentrados
 - Almacenamiento Ajustar a un pH 2.0-4.0 después de la recolección con HCl concentrado ó ácido acético.
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 2 días
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Durante las 48 horas previas a la recogida de la orina, suprimir de la dieta: plátanos, aguacates, tomates, ciruelas, nueces, berenjenas, café, ya que contienen altas dosis de serotonina.
 - Supresión medicación 72 horas antes suprimir: reserpina, naproxen, fenotiacinas, guayacolato de glicerol, inhibidores de la MAO y metildopa.
 - Otras consideraciones

ID. 9 5'-NUCLEOTIDASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—5'Nucleotidasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre o extensiones de sangre
 - Contenedor Extensiones directas de sangre con EDTA K3 (<2 h)
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 10 5'-NUCLEOTIDASA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—5'Nucleotidasa; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 0,5 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Extensiones de médula ósea sin fijar
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 11 6-FOSFOGLUCOSA DESHIDROGENASA ERITROCITARIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers(San)—6-Fosfogluconato-deshidrogenasa; act.cat.entfíca
- ☐ Sinónimos 6 PG
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3 o Heparina sódica
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Hemolizado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 15 días. 1 año a -70°C
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 12 ACETAMINOFENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Paracetamol; c.sust.
- ☐ Sinónimos Paracetamol
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Consignar hora de extracción y hora de la última dosis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 14 días
 - Refrigerado 14 días
 - Congelado 45 días
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Si se sospecha sobredosificación, la extracción debe realizarse, como mínimo 4 horas después de la ingesta.

ID. 13 ACETILCOLINESTERASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Acetilcolinesterasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ACHE;CHE;colinesterasa
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 17 días
 - Refrigerado 17 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 14 ACETILCOLINESTERASA ERITROCITARIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers(San)—Acetilcolinesterasa; act.cat.entífica
- ☐ Sinónimos ACHE eritrocitaria
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 5 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 5 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 15 ACETILCOLINESTERASA ISOENZIMAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Acetilcolinesterasa; arb.(isoenzimas)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemólisis
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 17 días
 - Refrigerado 17 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 16 ACIDEZ TITULABLE (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Acidez titulable; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido biológico
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 17 ACIDEZ TITULABLE (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de ácido (H+); caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 18 ACIDOS BILIARES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Acidos biliares; c.masa
- ☐ Sinónimos Sales biliares
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 semanas
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Mínimo 10 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 19 ACIDOS BILIARES (BILIS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Bil—Acidos biliares; c.masa
- ☐ Sinónimos Sales biliares
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biliar
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Bilis
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 20 ACIDOS GRASOS FRACCIONADOS (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Acidos grasos; arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1 g
 - Observaciones
 - Contenedor Contenedor de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 21 ACIDOS GRASOS LIBRES (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Acidos grasos(no esterificados); cont.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1 g
 - Observaciones
 - Contenedor Contenedor de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 22 ACIDOS GRASOS TOTALES (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Acidos grasos; cont.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1 g
 - Observaciones
 - Contenedor Contenedor de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 23 ACIDOS ORGANICOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Acidos orgánicos; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre heparinizada
 - Contenedor Tubo de plástico con heparina
 - Almacenamiento Enviar la muestra congelada en un tubo de plástico con hielo
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 24 ACIDOS ORGANICOS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Acidos orgánicos; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Enviar el espécimen congelado en recipiente de plástico y con hielo seco.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 25 ACILCARNITINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Acilcarnitina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Centrifugar lo antes posible en centrífuga refrigerada y congelar inmediatamente.
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Enviar la muestra congelada en un tubo de plástico con hielo seco.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 26 ACLARAMIENTO DE CREATININA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Glo—Líquido filtrado; cuadal volumen(depuración de creatinino)
- ☐ Sinónimos Clearance de creatinina
- ☐ Espécimen Tipo Orina y sangre
 - Volumen mínimo
 - Observaciones Ver espécimen para creatinina en sangre y orina de 24 h.
 - Contenedor Ver especímenes correspondientes.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Ver muestras correspondientes.
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno Evitar carne cocinada, café, ó té el día de la prueba.
 - Supresión medicación A ser posible se deben suprimir al menos una semana antes de la prueba cefalosporinas, salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos, como la indometacina, cimetidina, trimetoprim, quinina, quinidina y procainamida.
 - Otras consideraciones Evitar el exceso de ejercicio los días previos a la prueba, así como el exceso de carne en la dieta. Recomendar al paciente que beba agua y mantenga buen estado de hidratación.

ID. 27 ACTH

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Corticotropina; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos Corticotropina, Hormona adrenocorticotropa
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Añadir al tubo 100 µL de trasylol. Invertir el tubo varias veces, ponerlo en baño de hielo y llevar inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo con EDTA o Tubo con Heparina
 - Almacenamiento Tras la extracción colocar el tubo en baño de hielo un máximo de 30 minutos. Centrifugar a 4° C° y separar el plasma en tubos de plástico.
 - T° Ambiente 30 minutos
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 6 semanas
- ☐ Preparación Paciente Mínimo 12 horas.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Mantener el paciente en reposo antes de la extracción. Es recomendable realizar la toma de muestra entre 6 y 9 de la mañana.

ID. 28 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Activador del t-plasminógeno; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico acidificado
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 29 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Activador del t.plasminógeno; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico acidificado
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 días.
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 30 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO TIPO UROKINASA ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Activador del u-plasminógeno; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Citrato sódico acidificado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 31 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO TIPO UROKINASA FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Activador del t.plasminógeno; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico acidificado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 32 ADENILATO KINASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Adenilato-kinasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 33 ADENOSINADEAMINASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Adenosina-desaminasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ADA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 34 ADENOSINADEAMINASA (L.PLEURAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ADA
- ☐ Espécimen Tipo Líquido Pleural
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Líquido pleural
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 35 ADENOSINADEAMINASA (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ADA
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo LCR
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 36 ADENOVIRUS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el adenovirus; c.arb.
- ☐ Sinónimos Srm
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 37 ADENOVIRUS ANTIGENO (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Antígeno del adenovirus; cont.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1-5 g/1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 38 ADH

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Vasopresina; c.masa
- ☐ Sinónimos Hormona antidiurética, AVP, Vasopresina
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Poner en baño con hielo y llevar inmediatamente al Labortatorio. Centrifugar a 4°C antes de 15 minutos después de la extracción.
 - Contenedor Tubo con EDTA o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Congelado a -70°C la muestra se mantiene 1 mes.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 39 PRUEBA ANULADA

- ☐ Nomenclatura recomendada ..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 40 AGREGACION PLAQUETARIA ADP

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por difosfato de adenosina; incr.imped.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 41 AGREGACION PLAQUETARIA ARAQUIDONATO SODIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por araquidonato de sodio; incr.imped
- ☐ Sinónimos Plaquetas agregación inducida por ácido araquidónico.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 42 AGREGACION PLAQUETARIA COLAGENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por colágeno; incr.imped
- ☐ Sinónimos Agregación plaquetar inducida por Colágeno
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 43 AGREGACION PLAQUETARIA CON IONOFORO DEL CALCIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por ionoforo de calcio; incr. imped
- ☐ Sinónimos Agregación plaquetar inducida por ionóforo de calcio.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado Horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 44 AGREGACION PLAQUETARIA EPINEFRINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por epinefrina; incr. imped
- ☐ Sinónimos Agregación plaquetar inducida por epinefrina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 45 AGREGACION PLAQUETARIA RISTOCETINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por ristocetina; incr.imped
- ❑ Sinónimos Agregación plaquetar inducida por Ristocetina.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 46 AGREGACION PLAQUETARIA SEROTONINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por serotonina; incr.imped
- ❑ Sinónimos Agregación plaquetar inducida por Serotonina.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado Horas
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 47 AGREGACION PLAQUETARIA TROMBINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pqs—Agregación inducida por trombina; incr. impd
- ☐ Sinónimos Agregación plaquetar inducida por Trombina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico o ACD sin vacío
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma rico en plaquetas (PRP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 2-4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 48 ALANINA AMINOTRANSFERASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Alanina-aminotransferasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ALT, ALAT, GPT, SGPT, Transaminasa glutámico-pirúvica.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 3 días
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje . Evitar lipemia y hemolisis.
 - T° Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 49 ALBUMINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Albúmina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero/Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 meses
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 50 ALBUMINA (L.BIOLÓGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Albúmina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido biológico
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido biológico
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 meses
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 51 ALBUMINA (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Albúmina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Instrucciones almacenaje . Se puede almacenar a -70°C indefinidamente.
 - T° Ambiente
 - Refrigerado Menos de 72 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La muestra no debe ser hemática.

ID. 52 ALBUMINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de albúmina; caudal masa(24 h)
- ☐ Sinónimos Microalbuminuria, paucialbuminuria
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Contenedor de orina
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje . Si se utiliza un método nefelométrico, no congelar.
 - T° Ambiente 7 días
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 53 ALDOLASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Fructosa-bisfosfato-aldolasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ALD
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 54 ALDOSTERONA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Aldosterona; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Tras la extracción, colocar el tubo en baño con hielo, un máximo de una hora, centrifugar a 4° C° y separar el suero.
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Estable 1 año a -70° C
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado 4 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Dos semanas antes de la extracción, mantener una dieta normosódica (3 grs. sodio/día).
 - Supresión medicación Desde tres semanas antes de la prueba, suprimir: diuréticos, antihipertensivos, estrógenos y progestágenos cíclicos.
 - Otras consideraciones El paciente debe permanecer en reposo, acostado, 15 minutos antes de la extracción. La medicación aislada de aldosterona, carece de valor clínico si no se determina la actividad de la renina plasmática al mismo tiempo.

ID. 55 ALDOSTERONA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de aldosterona; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCL ó A. acético concentrados
 - Almacenamiento Ajustar a un pH de 4.0-4.5, después de la recolección con HCl concentrado ó ácido acético.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 2 años
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 2 años
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 56 ALFA 1 ANTITRIPSINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— α_1 -Antitripsina; c.masa
- ☐ Sinónimos AAT, α_1 -AT, Inhibidor de la Proteasa al.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 57 ALFA 1 ANTITRIPSINA (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fac— α_1 -Antitripsina; c.masa
- ☐ Sinónimos AAT, α_1 -AT. Inhibidor de la Proteasa a1
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - ☐ Volumen mínimo Muestra al azar
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Recipiente plástico
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado 48 horas
 - ☐ Congelado Indefinido
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado 48 horas
 - ☐ Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 58 ALFA 1 ANTITRIPSINA FENOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— α_1 -Antitripsina; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado 1 día
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 59

ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— α_1 -Glicoproteína ácida; c.masa
- ☐ Sinónimos Orosomucoide
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 60

ALFA 2 ANTIPLASMINA ANTIGENICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla— α_2 -Antiplasmina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 61 ALFA 2 ANTIPLASMINA FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla— α_2 —Antiplasmina; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 62 ALFA 2 MACROGLOBULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— α_2 —Macroglobulina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 63 ALFA AMILASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— α -Amilasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 64 ALFA AMILASA (L.ASCÍTICO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LAs— α -Amilasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos Amilasa
- ☐ Espécimen Tipo Líquido Ascítico
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Líquido ascítico
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 65 ALFA AMILASA (L.PLEURAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. L_{Pi}—α-Amilasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido pleural
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Líquido pleural
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 66 ALFA AMILASA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—α-Amilasa; c.cat. || Pac(Uri)—Excreción de α-Amilasa; caudal act.cat.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 1 h ó 24 h
 - Volumen mínimo
 - Observaciones Muy inestable en presencia de ácido úrico, ajustar a pH alcalino.
 - Contenedor Contenedor orina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 10 días
 - Congelado 3 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 67 ALFA AMILASA PANCREATICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—α-Amilasa pancreática; c.cat.
- ☐ Sinónimos 1-4-α-Glucan, D-Glucanohidrolasa, Isoenzima de la Amilasa
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 68 ALFA AMILASA PANCREATICA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. 2hUri—α-Amilasa pancreática;b
- ☐ Sinónimos 1-4-α-Glucan, D-Glucanohidrolasa, Isoenzima de la Amilasa
- ☐ Espécimen Tipo Orina 2 h
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 10 días
 - Congelado 3 semanas
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 10 días
 - Congelado 3 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 69 ALFA FETOPROTEINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm— α_1 -Fetoproteína; c.masa
- ❑ Sinónimos AFP, Alfa-1-Fetoproteína
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 3 días
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 3 meses
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Para usar como dato de diagnóstico prenatal de defectos del tubo neural o Síndrome de Down, consignar edad, peso y semana ecográfica. La concentración de alfa fetoproteína, en la embarazada alcanza el pico en la semana 30 y disminuye de la 34 a la 36.

ID. 70 ALFA FETOPROTEINA (L.AMNIOTICO)

- ❑ Nomenclatura recomendada .. LAm— α_1 Fetoproteína; c.masa
- ❑ Sinónimos AFP, Alfa 1 Fetoproteína
- ❑ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones Líquido amniótico extraído entre la 12 y 21 semanas. Consignar el la solicitud la semana ecográfica de gestación y el peso de la paciente.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 3 días
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 3 meses
- ❑ Muestra Tipo Líquido amniótico
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar la contaminación con sangre fetal ó materna, pequeñas cantidades de sangre pueden dar falsos positivos. Indicar la edad gestacional en el formulario de solicitud.

ID. 71 BETA N ACETILGLUCOSAMINIDASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— β -N-Acetilhexosaminidasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 72 ALFA NAFTIL ACETATO ESTERASA, ANAE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— α -Naftil-acetato-esterasa; c.cat. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre o extensiones de médula ósea sin fijar
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con EDTA-K3
 - ☐ Almacenamiento No almacenar, llevar al laboratorio
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Extensiones
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 3 días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 73 ALUMINIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Aluminio; c.sut.
- ☐ Sinónimos Al
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Jeringa y tubo especial para elementos traza
 - Almacenamiento No aconsejado.Mantener el tubo en posición vertical, la muestra no debe tocar el tapón.Centrifugar inmediatamente y separar.
 - Tª Ambiente Días sin destapar
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana sin destapar
 - Refrigerado 2 semanas sin destapar
 - Congelado 1 año sin destapar
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Separar la muestra en ambiente limpio de metales. Utilizar tubo de polipropileno con tapón, mejor lavado con ac.nítrico y aclarado con agua milliQ.

ID. 74 ALUMINIO (AGUA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Agua—Aluminio; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Agua
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Tubo de polipropileno con tapón , mejor lavado con acido nítrico y aclarado con H2O miliQ.
 - Contenedor
 - Almacenamiento Mantener el tubo tapado en posición vertical, la muestra no debe tocar el tapón.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Agua
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días sin destapar
 - Refrigerado 7 días sin destapar
 - Congelado 1 año sin destapar
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 75 ALUMINIO (L.DIALISIS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LDi—Aluminio; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido de diálisis
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo polipropileno lavado con ac.nítrico.
 - Almacenamiento Tubo y jeringa especiales para elementos traza.Mantener el tubo en posición vertical, la muestra no debe tocar el tapón. .
 - Tª Ambiente Días sin destapar
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido de diálisis
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días sin destapar
 - Refrigerado 7 días sin destapar
 - Congelado 1 año sin destapar
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 76 ALUMINIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Aluminio; ; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Al
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h, lavado con ácido nítrico
 - Almacenamiento No aconsejado, mantener el tubo en posición vertical, la muestra no debe tocar el tapón. Centrifugar inmediatamente.
 - Tª Ambiente Días sin destapar
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Separar la muestra en ambiente limpio de metales. Utilizar tubo de polipropileno con tapón, mejor lavado con ácido nítrico y aclarado con H2O miliQ
 - Tª Ambiente 3 días sin destapar
 - Refrigerado 7 días sin destapar
 - Congelado 1 año sin destapar
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 77 AMIKACINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Amikacina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Para monitorización, es necesario consignar la hora de la toma de la muestra y la hora de la última dosis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No almacenar. Centrifugar la sangre antes de una hora despues de la extracción.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Intravenosa: La concentración "pico" se obtiene 30 minutos después de la inyección. La concentración "valle", inmediatamente antes de la siguiente dosis.
 - Otras consideraciones La vida media de la amikacina es de 2-3 horas y se elimina por el riñón, por lo que un fallo renal altera su farmacocinética.

ID. 78 AMINOACIDOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Aminoácidos; c.masa
- ☐ Sinónimos aa plasmáticos.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA o Heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 1 hora
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 4 horas en lactantes y 12 en niños y adultos
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 79 AMINOACIDOS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de aminoácidos; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos aa
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento Si al recipiente se le añade 20 ml de Tolueno, la orina se puede conservar refrigerada (2-8°C°) durante 7 días.
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado 3 horas
 - Congelado 3 días
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Es recomendable suprimir cualquier tipo de medicación, sobre todo ampicilina y cefalosporinas. En caso de no ser posible, consignarlo en la solicitud.
 - Otras consideraciones

ID. 80 AMITRIPTILINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Amitriptilina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento Centrifugar el espécimen en centrífuga refrigerada y separa inmediatamente el suero.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado 4 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 81 AMONIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Amonio; c.sust.
- ☐ Sinónimos NH3, NH4.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio. Extremar las precauciones para evitar la hemolisis. No usar heparina porque aumenta el amonio. Tubo con EDTA
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento No almacenar, centrifugar a 4-8° C° antes de los 15 minutos después de la extracción.
 - Tª Ambiente 15 minutos con EDTA
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Se recomienda efectuar la determinación analítica lo más rápido posible. Evitar el humo de tabaco en el ambiente. Estabilizar con serina y borato. Serina: 5 mmol/l Borato: 2 mmol/l.
 - Tª Ambiente 15 minutos
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado 3 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones En sangre total a 25° C° los niveles de amonio aumentan a razón de 0,017 mg/ml/minuto.

ID. 82 AMONIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de amonio; caudal sust.(24 h).
- ☐ Sinónimos NH3, NH4.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h, con 10 ml. de Tolueno.
 - Almacenamiento Es recomendable no almacenar, remitir rápidamente al laboratorio. Para evitar los problemas de conservación, es aconsejable recoger la orina durante un tiempo corto, p.ej. 2 h
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 3 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 83 AMP CICLICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—AMP cíclico; c.sust.
- ☐ Sinónimos AMPc, Adenosin monofosfato cíclico, Adenosín 3'-5' monofosfato.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio. Realizar la extracción por la mañana.
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento No almacenar, centrifugar a 4-8° C° antes de los 15 minutos después de la extracción.
 - T° Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 1 hora
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 1 hora
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente La noche previa.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El AMPc presenta un ritmo circadiano con las concentraciones máximas por la noche y mínimas por la mañana. Realizar la extracción por la mañana.

ID. 84 AMP CICLICO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de AMP cíclico; caudal sust.(24 h).
- ☐ Sinónimos AMPc, Adenosin monofosfato cíclico, Adenosín 3'-5' monofosfato, AMPc nefrógeno.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento Ajustar a pH 3,5-4,5 después de la recolección con CIH o ácido acético concentrados.
 - T° Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 3 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Evitar crecimiento bacteriano.
 - T° Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El AMPc nefrogénico = AMPC urinario X 100 mL de filtrado glomerular - AMPC plasmático.

ID. 85 ANDROSTENEDIONA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Androstenodiona; c.sust.
- ❑ Sinónimos Delta-4-Androstendiona.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones Realizar la extracción por la mañana.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Centrifugar y separar el suero antes de una hora después de la extracción.
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado ?
- ❑ Preparación Paciente La noche previa.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La androstendiona presenta un ritmo circadiano con las concentraciones máximas a las 7 de la mañana, descendiendo su concentración a la mitad a las 4 de la tarde.

ID. 86 ANFETAMINAS (ORINA)

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Uri—Anfetaminas; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Evitar la presencia de detergentes en los recipientes de recogida de la muestra.
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ❑ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La presencia de detergentes y lejías en los recipientes de recogida de la muestra interfieren en los resultados. Los resultados positivos deberán confirmarse por otro método (GLC)

ID. 87 ANGIOTENSINA I

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Proangiotensina; c.sust.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio. Extremar las precauciones para evitar la hemólisis.
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento No almacenar, centrifugar a 4-8° C° antes de los 45 minutos después de la extracción.
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ❑ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 7 días a -70°C
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Dieta normosódica (3 g. Na al día).
 - Supresión medicación Durante las tres semanas anteriores a la realización de la prueba se deben suprimir: diuréticos, antihipertensivos, estrógenos y progestágenos cíclicos.
 - Otras consideraciones Tres días antes, limitar la ingesta de Na a 20 mEq/día y administrar 0,5 mg. de clorotiacida dos veces al día. Preparación rápida del paciente: Administrar 50 mg de furosemida

ID. 88 ANGIOTENSINA II

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Angiotensina; c.sust.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA disódica
 - Almacenamiento Mantener la jeringa fría, hacer la extracción, mantener frío y centrifugar inmediatamente en centrifuga refrigerada y congelar el sobrenadante.
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ❑ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 7 días a -70°C
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El paciente debe estar recostado 30 min antes de la extracción. Dieta normal. preguntar que medicación está tomando.

ID. 89 ANGIOTENSINA III

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Angiotensina III; c.sust.arb.???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA. Ver otras consideraciones
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente Dieta normal en Na.Recostado 30 min antes de extracción.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La muestra debe ser recogida en tubo frío y mantenido en mezcla frigorífica. Centrifugar cuanto antes en centrifuga refrigerada, separar plasma y si no se analiza inmediatamente congelarlo. Interfieren: diuréticos, mineralcorticoides, estrógenos, anovulatorios orales, ACTH, Na y K.

ID. 90 ANTIBIOGRAMA DIFUSION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Cultivo—Bacteria; sensibilidad(antibiótico)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo No procede
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor No procede
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 91 ANTIBIOGRAMA DILUCION. CMB

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Cultivo— Bacteria; sensibilidad(antibiótico; c.min.bac.)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo No procede
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor No procede
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 92 ANTIBIOGRAMA DILUCION. CMI

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Cultivo— Bacteria; sensibilidad(antibiótico; c.min.inh.)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo No procede
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor No procede
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 93 ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Cultivo— Micobacteria; sensibilidad(antibiótico)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo No procede
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor No procede
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 94 ANTICOAGULANTE LUPICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Anticoagulante lúpico; ;c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos L A; Anticoagulante tipo fosfolípido.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico.
 - Almacenamiento Poner el tubo en recipiente con hielo y llevar inmediatamente al laboratorio. Centrifugar a 4° C.
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación Suspender el tratamiento con cumarínicos las dos semanas previas a la extracción y con heparina los dos días anteriores.
 - Otras consideraciones No requiere preparación específica.

ID. 95 ANTICUERPOS ANTI-HLA ESTUDIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Placenta
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente específico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 96 ANTICUERPOS ANTI ANTIGENO NUCLEAR DE CELULAS DE PROLIFERACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno nuclear de células de proliferación;c arb.
- ☐ Sinónimos anti-PCNA, PCNA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 97 ANTICUERPOS ANTI C1Q

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno C1Q; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. C1q
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 98 ANTICUERPOS ANTI MI2

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra MI2; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 99 ANTICUERPOS ANTI nDNA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno nDNA; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos n-DNA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 100 ANTICUERPOS ANTI OKT3

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno OKT3; c.arb.
- ☐ Sinónimos a-OKT3
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 101 ANTICUERPOS ANTIADRENALES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra corteza; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos corteza suprarrenal
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 102 ANTICUERPOS ANTIAMINOACIL TRNA SINTETASA, NO JO-1

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra TRNA sintetasa; c.arb.
- ☐ Sinónimos PL-7, PL-12, EJ, OJ
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 103 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO JO-1

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno Jo1; c.arb.
- ❑ Sinónimos Anticuerpos Jo-1
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 104 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO KU

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno KU; c.arb.
- ❑ Sinónimos Ku
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 105 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO LA. SS/B

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno La (SS/B); c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos SSB
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 106 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO LKM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno LKM; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos LKM
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 107 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO NUCLEAR EXTRAIBLE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno nuclear extraíble; c.arb.
- ☐ Sinónimos ENA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 108 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO PM 1

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno PM1; c.arb.
- ☐ Sinónimos Pm-1
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 109 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO RNP

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno RNP; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos RNP
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 110 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO RO. SS/A

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno Ro (SS/A); c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos SSA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 111 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO SCL 70

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno ScL70; c.arb.
- ❑ Sinónimos Anticuerpos SCL-70
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 112 ANTICUERPOS ANTIANTIGENO SM

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno Sm; c.arb.
- ❑ Sinónimos Anticuerpos Sm
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 113 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA IGA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra cardiolipina IgA; c.arb.
- ☐ Sinónimos a-Cardiolipina IgA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 114 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra cardiolipina IgG; c.arb.
- ☐ Sinónimos ACA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 115 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra cardiolipina; c.arb.
- ☐ Sinónimos A-cardiolipina IgM
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 116 ANTICUERPOS ANTICARTILAGO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra cartílago; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. contra las células del cartílago
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 117 ANTICUERPOS ANTICELULAS BETA PANCREATICAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra células beta pancreáticas; c.arb.
- ☐ Sinónimos ICA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 118 ANTICUERPOS ANTICELULAS DE LEYDIG TESTICULARES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra células de Leydig testiculares; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 119 ANTICUERPOS ANTICELULAS PARIETALES GASTRICAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra célula parietales gástricas; c.arb.
- ☐ Sinónimos PCA, anti-mucosa gástrica
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 120 ANTICUERPOS ANTICELULAS PRINCIPALES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra células principales; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 121 ANTICUERPOS ANTICELULAS PRODUCTORAS DE ADH

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra células productoras de ADH; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Anti-pituitaria productora de ADH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 122 ANTICUERPOS ANTICELULAS SOMATOTROPAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra células somatotropas; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Anti-pituitaria somatotrópica
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 123 ANTICUERPOS ANTICENTROMERO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra centrómero; c.arb.
- ❑ Sinónimos a-centrómero, a-CM
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 124 ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS, PATRON ATIPICO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra citoplasma de neutrófilos patrón atípico;c arb.
- ❑ Sinónimos x-ANCA
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 125 ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS, PATRON CITOPLASMICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra citoplasma de neutrófilos patrón citoplásmico;c arb.
- ☐ Sinónimos anti-PR3, PR3-ANCA, C-ANCA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 126 ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS, PATRON PERINUCLEAR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra citoplasma de neutrófilos patrón perinuclear;c arb.
- ☐ Sinónimos A-ANCA, ANCA atípicos (anti-BPI, anti-Lactoferrina, anti-Catepsina, anti-Elastasa)
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 127 ANTICUERPOS ANTICOLAGENO TIPO II

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra colágeno tipo II; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Anti-colágeno fibrilar.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 128 ANTICUERPOS ANTIDECARBOXILASA DEL ACIDO GLUTAMICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra descarboxilasa del ácido glutámico;c arb.
- ☐ Sinónimos Anti-GAD
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 129 ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra endomisio; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 130 ANTICUERPOS ANTIENTEROCITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra enterocitos; c.arb.
- ☐ Sinónimos GECA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 131 ANTICUERPOS ANTIERITROCITO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra eritrocito; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 132 ANTICUERPOS ANTIESTREPTOLISINA O

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la estreptolisina O; c.arb.
- ☐ Sinónimos ASLO, ASO
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 133 ANTICUERPOS ANTIFACTOR INTRINSECO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el factor intrínseco; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos factor intrínseco
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar efectuar la extracción en pacientes que hayan sido sometidos a exploraciones "in vivo" con isótopos radioactivos.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación Suspendir tratamiento con Vit. B12, 48 horas antes de la toma de la muestra.
 - Otras consideraciones

ID. 134 ANTICUERPOS ANTIFIBRILARINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra fibrilarina; c.arb.
- ☐ Sinónimos AFA, Ac. Anti-U3-RNP.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 135 ANTICUERPOS ANTIFOSFATIDILSERINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra fosfatidilserina; c.arb.
- ☐ Sinónimos a-FL
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 136 ANTICUERPOS ANTIGLANDULAS SALIVARES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra glándulas salivares; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 137 ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IGA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgA) contra el antígeno de gliadina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemólisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 138 ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra el antígeno de gliadina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemólisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 139 ANTICUERPOS ANTIHIPOFISIS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra hipófisis; c.arb.
- ☐ Sinónimos ac. anti-pituitaria
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 140 ANTICUERPOS ANTIHISTONAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Histonas; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. anti-histonas
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 141 ANTICUERPOS ANTIIGA, MEDIADAS POR IGG, IGM E IGE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra IgA mediadas por IgG,IgM e IgE; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Anti-IgA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 142 ANTICUERPOS ANTIINSULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo anti-Insulina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 143 ANTICUERPOS ANTILÍNEA ESPERMÁTICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antilínea espermática; c.arb.
- ☐ Sinónimos a-esperma
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 144 ANTICUERPOS ANTIMEMBRANA BASAL DERMOEPIDERMICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antimembrana basal dermoepidérmica; c.arb.
- ☐ Sinónimos AMB, a-membrana basal, anti-piel, anti-esófago, Ac. anti-MBD
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 145 ANTICUERPOS ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra membrana basal; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 146 ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES TIROIDEOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antimicrosomales; c.arb.
- ☐ Sinónimos TM
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 147 ANTICUERPOS ANTIMIELOPEROXIDASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra mieloperoxidasa; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 148 ANTICUERPOS ANTIMIOCARDICOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antimiocardio; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpos miocardio
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 149 ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antimitocondriales; c.arb.
- ❑ Sinónimos AMA
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 150 ANTICUERPOS ANTIMUSCULO ESQUELETICO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el músculo estriado; c.arb.
- ❑ Sinónimos ASME
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 151 ANTICUERPOS ANTIMUSCULO LISO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el músculo liso; c.arb.
- ☐ Sinónimos ASMA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 152 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antinucleares; c.arb.
- ☐ Sinónimos ANA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 153 ANTICUERPOS ANTIOVARIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra ovario; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 154 ANTICUERPOS ANTIPARTICULAS DE RECONOCIMIENTO DE SEÑAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra partículas de reconocimiento de señal;c arb.
- ☐ Sinónimos Anti-SRP
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 155 ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS INDUCIDOS POR HEPARINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Anticuerpo contra plaquetas inducidos por heparina;c arb.
- ☐ Sinónimos Anti-P4P inducidos por heparina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 156 ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS PRUEBA DIRECTA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Anticuerpo contra plaquetas prueba directa; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10ml (segun nº plaq)
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Concentrado plaquetar
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 157 ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS PRUEBA INDIRECTA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Anticuerpo antiplaquetarios prueba indirecta; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anticuerpo antiplaquetares.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10ml (según nº plaq)
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Concentrado plaquetar
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 158 ANTICUERPOS ANTIPROTEÍNA ASOCIADA A LA MIELINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo antiproteína asociada a la mielina; c.arb.
- ☐ Sinónimos Acs. anti-MAG.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 159 ANTICUERPOS ANTIPROTEINAS DEL SHOCK TERMICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra proteína del Shock térmico; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Anti-proteínas de stress
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 160 ANTICUERPOS ANTIPROTEINASA 3

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra proteínasa3; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 161 ANTICUERPOS ANTIRRECEPTORES DE ACETILCOLINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el receptor de acetilcolina; c.arb.
- ❑ Sinónimos Anticuerpos AnticuerposR
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No conservar, centrifugar rápidamente a 4° C°, separar el suero en tubo de plástico y remitir rápidamente al laboratorio.
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno No
 - Supresión medicación Informar si el paciente está en tratamiento con inmunosupresores.
 - Otras consideraciones

ID. 162 ANTICUERPOS ANTIRECEPTORES DE LA HORMONA TSH. TSI-LATS

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el receptor de tirotropina; c.arb.
- ❑ Sinónimos Anticuerpos anti-TSH
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemólisis
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente ?
 - Refrigerado 6 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 163 ANTICUERPOS ANTIRRETICULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Reticulina; c.arb.
- ☐ Sinónimos ARA, Anticuerpos a reticulina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 164 ANTICUERPOS ANTIRRETINIANOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la retina; c.arb.
- ☐ Sinónimos Acs. anti-IRBP, Acs. anti-antígeno S,
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No-procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 165 ANTICUERPOS ANTIRRIBONUCLEOPROTEINAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra ribonucleoproteínas; c.arb.
- ☐ Sinónimos RNP
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 166 ANTICUERPOS ANTIRRIBOSOMALES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra ribosoma; c.arb.
- ☐ Sinónimos ARA, anticuerpos anti proteína P ribosomal
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 167 ANTICUERPOS ANTISUSTANCIA INTERCELULAR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la sustancia intercelular; c.arb.
- ☐ Sinónimos ASIC, anti-piel, anti-esófago, Ac. antiS2E
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado No procede
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 168 ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la Tiroglobulina; c.arb.
- ☐ Sinónimos a-tiroglobulina, a-TYR, a-TG
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado No procede
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 169 ANTICUERPOS CITOTOXICOS ANTI HLA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo citotóxicos contra HLA; c.arb.
- ☐ Sinónimos Citotóxicos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Indicar si el paciente ha recibido transfusiones y el tratamiento al que está sometido.

ID. 170 ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENO DE FORSSMANN

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno de Forssmann; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Forssmann
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 171 ANTICUERPOS CONTRA EL C1INH

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra C1INH; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. C1INH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones Sangre
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado No procede
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno 3 horas
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 172 ANTICUERPOS HETEROFILOS AGLUTINANTES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo heterófilos aglutinantes; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. heterófilos aglut.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado No procede
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno 3 horas
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 173 ANTICUERPOS IRREGULARES DESPISTAJE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo irregulares despistaje; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. irregulares. EAI.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelacion de los sueros debe hacerse a 37°C y procesarlos a continuacion
 - T° Ambiente No
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 174 ANTICUERPOS IRREGULARES IDENTIFICACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo irregulares identificación; c.arb.
- ☐ Sinónimos Identificacion AI.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación de los sueros sebe realizarse a 37 °C y procesarlos a continuación
 - T° Ambiente No
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 175 ANTICUERPOS PERINUCLEARES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo perinucleares; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. factor perinuclear
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 176 ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Antidepresivos tricíclicos; c.masa
- ☐ Sinónimos Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Doxepina, Imipramina, Maprotilina, Nortriptilina, Protiptilina, Amoxapina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Consignar hora de extracción y hora de la última dosis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina ó de vidrio sin plastificador TBEP.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje . Amitriptilina, Protiptilina y Nortriptilina 5 días (25° C°), 14 días (4°C°). Imipremina y Desipramina almacenadas en tubo de vidrio o polipropileno bien tapados 6 meses (-20°)
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Es necesario efectuar la extracción en la fase de eliminación del fármaco, al menos 8 horas después de la última toma.

ID. 177 ANTIGENO CA 125

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno carbohidratado 125; c.masa
- ☐ Sinónimos CA 125
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 178 ANTIGENO CA 15.3

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno carbohidratado 15-3; c.masa
- ☐ Sinónimos CA 15.3
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 179 ANTIGENO CA 19.9

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno carbohidratado 19-9; c.masa
- ☐ Sinónimos CA 19.9
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 180 ANTIGENO CA 549

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno carbohidratado 549; c.masa
- ☐ Sinónimos CA 549
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 181 ANTIGENO CA 72.4

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno carbohidratado 72-4; c.masa
- ☐ Sinónimos CA 72.4
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 182 ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO. CEA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno carcinoembrionario; c.masa
- ☐ Sinónimos CEA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 183 ANTIGENO CYFRA 21.1

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno Cyfra; c.masa
- ☐ Sinónimos CYFRA 21.1
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 184 ANTIGENO HLA B27

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lfs—Antígeno HLA B27; c.arb.
- ☐ Sinónimos B27, HLA-B27
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Linfocitos totales aislados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 185 ANTIGENO POLIPEPTIDICO TISULAR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno polipeptídico tisular; c.masa
- ☐ Sinónimos TPA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 186 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno Prostático específico libre; c.masa
- ☐ Sinónimos PSA libre
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Si no se procesa inmediatamente es necesario congelar.
Se puede conservar durante 2 años a -70 °C.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 2 meses a -20°C
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones

ID. 187 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO. PSA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno específico de próstata; c.masa
- ☐ Sinónimos PSA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Si no se procesa inmediatamente es necesario congelar.
Se puede conservar durante 2 años a -70 °C.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente Sí.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc. Evitar un tacto rectal las 48 horas previas a la extracción ya que puede aumentar las cifras de PSA.

ID. 188 ANTIGENO TISULAR ESPECIFICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno tisular específico; c.masa
- ☐ Sinónimos TPS
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 189 ANTIGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD DE CLASE I SOLUBLE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno de Histocompatibilidad de clase I soluble; c.arb.
- ☐ Sinónimos HLA soluble
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 190 ANTIGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD DE CLASE I SOLUBLE (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Antígeno de Histocompatibilidad de clase I soluble; c.arb.
- ☐ Sinónimos HLA soluble
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo LCR
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 191 ANTIGENOS HLA CLASE I

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lfs—Antígeno HLA clase I; c.arb.
- ☐ Sinónimos A,B,C o Tipaje clase I por serología o Pruebas de histocompatibilidad
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Linfocitos totales aislados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 192 ANTIGENOS HLA CLASE II

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lfs—Antígeno HLA clase II; c.arb.
- ☐ Sinónimos DR, tipaje clase II por serología, pruebas de Histocompatibilidad
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Linfocitos B purificados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 193 ANTIGENOS HLA DE CLASE II POR TEC.DE GENET MOL. ALTA RESOLUCION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ADN—Antígeno HLA de clase II por técnicas de genética molecular alta resolución;c arb.
- ☐ Sinónimos HLA-Clase II alta resolución
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 194 ANTIGENOS HLA DE CLASE II POR TECNICAS DE GENETICA MOLECULAR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ADN—Antígeno HLA de clase II por técnicas de genética molecular;c arb.
- ☐ Sinónimos HLA-DR, DQ
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 195 ANTIGENOS MICROBIANOS (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Antígenos microbianos; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Evitar refrigeración
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo LCR centrifugado
 - Instrucciones almacenaje . Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 196 ANTIGENOS MICROBIANOS (MUESTRAS BIOLOGICAS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Antígenos microbianos; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo 1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Muestra biológica centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 197 ANTIHAEMOPHILUS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Haemophilus; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Haemophilus
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 198 ANTISUEROS ANTI-HLA ESTUDIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Antisueros
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo Placenta
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 199 ANTISUEROS ANTI HLA OBTENCION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Placenta y sangre de cordón
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero de placenta y linfocitos totales aislados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado El suero, 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 200 ANTITROMBINA III ANTIGENICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Antitrombina antigénica
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 dias
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 201 ANTITROMBINA III FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Antitrombina funcional; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 202 APOLIPOPROTEINA A1

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína A-I; c.masa
- ☐ Sinónimos Apo A1
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
 - Refrigerado: 1 semana
 - Congelado: 3 años
 - A -70°C se puede consevar durante largos periodos de tiempo.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No congelar
- ☐ Preparación Paciente 14 horas previas.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 203 APOLIPOPROTEINA B

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína B; c.masa
- ☐ Sinónimos Apo B
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
Refrigerado: 1 semana
Congelado: 3 años
A -70°C se puede conservar durante largos periodos de tiempos.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No congelar
- ☐ Preparación Paciente 14 horas previas.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 204 APOLIPOPROTEINA C-II

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína C-II; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
Refrigerado: 1 semana
Congelado: 3 años
A - 70°C se puede conservar durante largos periodos de tiempo.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No congelar
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 205 APOLIPOPROTEINA C-III

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína C-III; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
Refrigerado: 1 semana
Congelado: 3 años
A -70°C se puede conservar durante largos periodos de tiempo.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No congelar
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 206 APOLIPOPROTEINA E

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína E; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
Refrigerado: 1 semana
Congelado: 3 años
A -70°C se puede conservar durante largos periodos de tiempo.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 207 APOLIPOPROTEINA E FENOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína E (fenotipo); c.arb..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
Refrigerado: 1 semana
Congelado: 3 años
A -70°C se puede conservar durante largos periodos de tiempo.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 208 APOLIPOPROTEINA E GENOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Apolipoproteína E (genotipo); c.arb..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Con un estabilizador (thimerosal) se puede conservar:
Refrigerado: 1 semana
Congelado: 3 años
A -70°C se puede conservar durante largos periodos de tiempo.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 209 APOPTOSIS LINFOCITARIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Apoptosis linfocitaria; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 210 ARILSULFATASA A

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Prt(Lks)—Arilsulfatasa A;2/m
- ☐ Sinónimos N acetil galactosamina 4 Sulfato sulfatasa
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Leucocitos
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No especial preparación
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 211 ARILSULFATASA B

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Prt(Lks)—Arilsulfatasa B;2/m
- ☐ Sinónimos N-acetilgalactosamina-4-sulfatasa
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Leucocitos
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No especial preparación
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 212 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Aspartato-aminotransferasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos ASAT, AST, GOT, SGOT, Transaminasa glutámico oxalacetica.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar la hemolisis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado Suero o plasma
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 213 ASPERGILLUS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Aspergillus; c.arb.
- ☐ Sinónimos Precipitinas Aspergillus
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 5 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4-5 horas
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 4-5 horas
 - ☐ Refrigerado 4-5 días
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 214 ASPIRADO DE MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Aspirado médula ósea; c.arb..
- ☐ Sinónimos Mielograma
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - ☐ Volumen mínimo 0,25 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Portaobjetos o recipiente de cristal
 - ☐ Almacenamiento Realización inmediata
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 48 horas
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 215 ASPIRADO GANGLIONAR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANS.(GANGLIO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. GAN—Aspirado ganglionar microscopia electrónica de trans.;c arb.
- ☐ Sinónimos MET de Punción ganglionar
- ☐ Espécimen Tipo Tejido ganglionar
 - Volumen mínimo 2 gotas
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con líquido conservante (Hanks) heparinizado
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Tejido ganglionar
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones

ID. 216 ASPIRADO MEDULAR TECNICA DE INCLUSION (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Aspirado medular; c.arb.
- ☐ Sinónimos MET de aspirado medular
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con líquido de Hanks heparinizado
 - Almacenamiento No almacenar, llevar inmediatamente al laboratorio
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Aspirado de médula ósea
 - Instrucciones almacenaje . No almacenar, procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 217 ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO I ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos SCA-I, estudio de repeticiones CAG en el gen de la ataxia espinocerebelar Tipo I
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 218 ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO I ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones "CAG" del cromosoma 12, estudio genético de la DRPLA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 219 ATROFIA DENTATORUBRAL PALIDO LUISIANA ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones «CAG» del cromosoma 12, estudio genético de la DRPLA
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 220 ATROFIA DENTATORUBRAL PALIDO LUISIANA ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones «CAG» del cromosoma 12, estudio genético de la DRPLA.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 221 ATROFIA MUSCULAR ESPINOBULBAR LIGADA AL CROMOSOMA X EST. GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio repeticiones «CAG» en receptor del andrógeno.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 222 ATROFIA MUSCULAR ESPINOBULBAR LIGADA AL CROMOSOMA X EST. PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio repeticiones «CAG» en receptor del andrógeno.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 223 AUTOHEMOLISIS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Hemoglobina (de autohemólisis); c.arb.
- ☐ Sinónimos Autohemólisis.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 50 ml
 - Observaciones Sangre desfibrinada
 - Contenedor Recipiente de vidrio estéril para desfibrinar la sangre
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total desfibrinada estéril.
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 224 BARBITURATOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Barbituratos; c.arb. (o;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco, sin separador de suero
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 meses
 - Refrigerado 6 meses
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 225 BARBITURATOS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Barbitúricos; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Contenedor de orina
 - Almacenamiento Los detergentes pueden interferir en la determinación.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 semana
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación El periodo de detección se prolonga los tres días siguientes a la toma, excepto para el fenobarbital que tiene un periodo de detección de dos semanas. Los resultados positivos deben confirmarse por otro método (GLC)
 - Otras consideraciones

ID. 226 BARTONELLA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Bartonella; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la extracción
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 227 BENZODIACEPINAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Benzodiazepinas; c.arb. (o;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con fluoruro sódico u oxalato potásico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje ..
 - Tª Ambiente 5 meses
 - Refrigerado 5 meses
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 228 BENZODIACEPINAS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Benzodiazepinas; c.arb. (o;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Los detergentes pueden interferir en la determinación.
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 4 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje ..
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno No
 - Supresión medicación El periodo de detección se prolonga durante dos semanas después del consumo. Los resultados positivos deben confirmarse por otro método (GLC).
 - Otras consideraciones

ID. 229 BETA-2-MICROGLOBULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— β_2 -Microglobulina; c.masa
- ☐ Sinónimos B2M
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 230 BETA 2 MICROGLOBULINA (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR— β_2 -Microglobulina; c.masa
- ☐ Sinónimos Beta2M
- ☐ Espécimen Tipo Líquido cefaloraquídeo
 - Volumen mínimo 0,4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo LCR centrifugado y separado
 - Instrucciones almacenaje . Centrifugar y separar líquido
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado A -20°C 6m, a -70°C indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La muestra no debe ser sanguinolenta

ID. 231 BETA-2-MICROGLOBULINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de β_2 -microglobulina; caudal masa(24 h)
- ☐ Sinónimos B2M
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones Alcalinizar la orina a pH >5.5 con bicarbonato. Consignar la diuresis.
 - ☐ Contenedor Recipiente orina 24 h
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina alcalinizada, mezclada y centrifugada
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 24 horas
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones Determinar la concentración de creatinina al mismo tiempo.

ID. 232 BETA GALACTOSIDASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lks— β -Galactosidasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 7 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con ACD
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Leucocitos
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No especial preparación
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 233 BETA GLUCURONIDASA. (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs— β -Glucuronidasa; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 0,5 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Extensiones de médula ósea sin fijar
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 234 BETA HIDROXIBUTIRATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm— β -Hidroxibutirato; c.arb.
- ☐ Sinónimos 3-Hidroxibutirato
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 12 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 12 horas
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente No especial preparación
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 235 BETA TROMBOGLOBULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla— β -Tromboglobulina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico+agentes antiplaquetarios
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Tubo especial siliconado con EDTA o citrato enfriado a 4°C y al que se le añade prostaglandina E1 y teofilina.
Centrifugar (0-4°C) a 1900g 60 min. Las muestras no deben ser hemolizadas ni lipémicas y deben ser transportadas en los tubos especiales sobre mezcla frigorífica.

ID. 236 BICARBONATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Hidrogenocarbonato; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Jeringa de gasometría con anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Consevar cerrado.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 237 BICARBONATO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de hidrogenocarbonato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos CO3H
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h ó fracción.
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones Consignar diuresis.
 - ☐ Contenedor Recipiente de vidrio con 10 ml. de tolueno.
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 238 BILIRRUBINA CONJUGADA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Bilirrubina esterificada; c.sust..
- ☐ Sinónimos Bilirrubina directa, Glucuronato de bilirrubina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones Preservar de la luz.
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 7 días en oscuridad
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 239 BILIRRUBINA TOTAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Bilirrubina; c.sust..
- ☐ Sinónimos Bilirrubina total.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Preservar de la luz.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días en oscuridad
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 240 BILIRRUBINA TOTAL (L. AMNIOTICO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LAm—Bilirrubina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 días en la oscuridad
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido amniótico
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 241 BILIRRUBINA TOTAL (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Bilirrubina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días en oscuridad
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Instrucciones almacenaje . Para conservar el espécimen más de 8 horas se requiere oscuridad.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 242 BIOPSIA DE MEDULA OSEA. INCLUSION EN MAT.PLASTICO, METACRIL(M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MSo—Células; arb.(inclusión en metacrilato)
- ☐ Sinónimos Biopsia medular
- ☐ Espécimen Tipo Cilindro de médula ósea
 - Volumen mínimo 2 cm
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con líquido fijador
 - Almacenamiento Fijación inmediata
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 48 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Cilindro de médula ósea preparado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 48 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente Medicación previa o anestesia raquídea
 - Ayuno Sí
 - Supresión medicación No tomar dicumarínicos (SINTROM), aspirina o antiagregantes plaquetarios.
 - Otras consideraciones Consultar con el médico que realizará la extracción.

ID. 243 BIOPSIA DE MEDULA OSEA. INCLUSION EN PARAFINA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MSo—Células; arb.(inclusión en parafina)
- ☐ Sinónimos Biopsia medular
- ☐ Espécimen Tipo Cilindro de médula ósea
 - Volumen mínimo 2 cm
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con líquido fijador
 - Almacenamiento Fijación inmediata
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 48 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Cilindro de médula ósea preparado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 48 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente Medicación previa o anestesia raquídea
 - Ayuno Sí
 - Supresión medicación No tomar dicumarínicos (SINTROM). aspirina o antiagregantes plaquetarios
 - Otras consideraciones Consultar con el médico que realizará la extracción

ID. 244 PRUEBA ANULADA

- ☐ Nomenclatura recomendada ..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 245 BIOPSIA DE MEDULA OSEA. MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANS. (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MSo—Células; arb.(microscopía electrónica)
- ☐ Sinónimos MET de biopsia
- ☐ Espécimen Tipo Cilindro de médula ósea
 - Volumen mínimo 2 cm
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con líquido fijador
 - Almacenamiento Fijación inmediata
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 48 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Cilindro de médula ósea preparado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 48 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente Medicación previa o anestesia raquídea
 - Ayuno Sí
 - Supresión medicación No tomar dicumarínicos (SINTROM), aspirina o antiagregantes plaquetarios
 - Otras consideraciones Consultar con el médico que realizará la extracción

ID. 246 BORRELIA BURDOGFERI ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Borrelia Burdogferi; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 247 BORRELIA BURDOGFERI ANTICUERPOS (LCR)

- ❑ Nomenclatura recomendada .. LCR—Anticuerpo contra Borrelia Burdogferi; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo LCR
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 248 BRUCELLA ANTICUERPOS

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Brucella; c.arb.
- ❑ Sinónimos Aglutinaciones a Brucella
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 249 BRUCELLA ANTICUERPOS (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Anticuerpo contra Brucella; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo LCR
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 250 BRUCELLA, PRUEBA DE COOMBS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Brucella (prueba de coombs); c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida del suero.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a extracción
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 251 BRUCELLA, ROSA DE BENGALA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Brucella (rosa de bengala); c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 252 BUTIRATO ESTERASA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Butirato Esterasa; c.arb.
- ☐ Sinónimos Alfa-Naftil Butirato Esterasa
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 0,5 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Extensiones de médula ósea sin fijar
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 253 CADENAS LIGERAS KAPPA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cadena ligera kappa; c.masa
- ❑ Sinónimos Cadenas Kappa, Cadenas k.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 254 CADENAS LIGERAS KAPPA (ORINA)

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de cadenas ligeras k; caudal masa(24 h)
- ❑ Sinónimos KAP
- ❑ Espécimen Tipo Orina de 24 h ó fracción
 - Volumen mínimo 50 ml
 - Observaciones Orina
 - Contenedor Recipiente plástico ó vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 3 meses
- ❑ Muestra Tipo Orina concentrada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 255 CADENAS LIGERAS LAMBDA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cadenas ligeras λ ; c.masa
- ☐ Sinónimos Cadenas Lambda, Cadenas l
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 256 CADENAS LIGERAS LAMBDA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de cadenas ligeras λ ; caudal masa(24 h)
- ☐ Sinónimos LAM
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 h ó fracción
 - Volumen mínimo 50 ml
 - Observaciones Orina
 - Contenedor Recipiente plástico ó vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina concentrada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 257 CALCIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Calcio (ID); c.sust.
- ☐ Sinónimos Calcemia, Ca en suero.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones En caso de usar anticoagulante este debe ser heparina.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 22 días
 - Congelado 8 meses
- ☐ Preparación Paciente Aconsejable.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar el éstasis venoso prolongado. Preferible efectuar la extracción por la mañana (existen variaciones diurnas).

ID. 258 CALCIO (L. BIOLÓGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Calcio; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido biológico
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento En caso de usar anticoagulante, éste debe ser heparina.
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado 3 semanas
- ☐ Muestra Tipo Líquido biológico
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado 3 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 259 CALCIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de calcio(II); caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Calciuria, Ca en orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones Consignar la diuresis.
 - ☐ Contenedor Recipiente orina 24 h con 20 mL HCl 6N
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado 4 días
 - ☐ Congelado 3 semanas
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada pH<2
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno Tres días antes de la recogida de la orina se debe seguir una dieta normocálcica (800 mg de Ca/día).
 - ☐ Supresión medicación Suspender tres días antes los medicamentos que afectan el metabolismo hidromineral: antiácidos, fosfatos, glucocorticoides, inhibidores de la anhidrasa carbónica, anticonvulsivantes y diuréticos incluídas las tiacidas.
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 260 CALCIO IONICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Ion calcio(II); c.sust.
- ☐ Sinónimos Ca++, Calcio ionizado, Calcio libre.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones Efectuar la extracción de forma anaerobia. Remitir inmediatamente al laboratorio.
 - ☐ Contenedor Jeringa heparinizada.
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 15 min
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 2 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 261 CALCITONINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Calcitonina; c.masa
- ☐ Sinónimos Tirocalcitonina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No almacenar. Llevar inmediatamente al laboratorio y centrifugar a 4° C° y separar el suero antes de 10 minutos.
 T° Ambiente: 1 hora estabilizada con oprotinina (400KU/ml)
 - T° Ambiente 1 hora
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 262 CALCULOS BILIARES ESTUDIO (CALCULO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. CBi— Entidades moleculares; arb.
- ☐ Sinónimos Cálculo biliar
- ☐ Espécimen Tipo Cálculo
 - Volumen mínimo Todo el espécimen
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente de plástico
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente Indefinido
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
- T° Ambiente
- Refrigerado
- Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones

ID. 263 CALCULOS RENALES ESTUDIO (CALCULO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. CUr—Entidades moleculares; arb.
- ☐ Sinónimos Cálculo renal.
- ☐ Espécimen Tipo Cálculo
 - Volumen mínimo Todo el espécimen
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Indefinido
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 264 CALCULOS SALIVARES ESTUDIO (CALCULO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Slv— Entidades moleculares; arb.
- ☐ Sinónimos Cálculo salival.
- ☐ Espécimen Tipo Cálculo
 - Volumen mínimo Todo el espécimen
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Indefinido
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones