

ID. 809 NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLE TIPO 2B ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Cambio de treonina a metionina en la posición 664 del protooncogen RET; MEN-2B.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 810 NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLE TIPO 2B ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Cambio de treonina a metionina en la posición 664 del protooncogen RET; MEN-2B.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 811 NEOPTERINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Neopterina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones Proteger de la luz
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina ó con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 812 NEOPTERINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Neopterina; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Proteger de la luz.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h opaco o protegido de la luz.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Ver espécimen.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 813 NIACINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. 3-carboxipiridina
- ☐ Sinónimos Acido nicotínico, nicotinamida, niacinamida, vit B3
- ☐ Espécimen Tipo Orina muestra aislada
 - Volumen mínimo
 - Observaciones Preservar de la luz. Puede usarse tolueno como conservante.
 - Contenedor Plástico o vidrio
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 3 meses
- ☐ Muestra Tipo Ver espécimen
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 814 NITROGENO (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Nitrógeno; c.arb.
- ☐ Sinónimos N2 Fecal
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 10 gramos
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico ó vidrio
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 14 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Ver espécimen
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 815 NITROGENO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Nitrógeno; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 horas
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 816 PRUEBA ANULADA

- ☐ Nomenclatura recomendada ..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 817 OMEGA EXONUCLEASA (M.0)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Omega exonucleasa; cont.arb.
- ☐ Sinónimos Citoquímica
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 0,5 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Extensiones de médula ósea sin fijar
 - Almacenamiento No almacenar, llevar al laboratorio
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea
 - Instrucciones almacenaje . No almacenar, procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 818 ONCOGENES ESTUDIO DE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 819 OPIACEOS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Opiáceos; c.arb.
- ☐ Sinónimos Anileridina, Heroína, Codeína, Hidrocodona, Hidromorfona, Meperidina, Metadona, Morfina, Narcóticos, Analgésicos narcóticos, Agonistas opiáceos, Pentazocina, Propoxifeno.
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Recipiente plástico ó vidrio
 - ☐ Almacenamiento A excepción del propoxifeno lo siguiente
 - ☐ Tª Ambiente ?
 - ☐ Refrigerado ?
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones No requiere preparación específica. La presencia de detergentes ó lejía en los recipientes de recogida interfiere en la determinación. Los resultados positivos deben confirmarse por otro método (GLC).

ID. 820 ORINA ESTUDIO BASICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Entidades moleculares; arb.
- ☐ Sinónimos Urinálisis, Urinálisis cualitativo, Constituyentes químicos en orina, Examen de orina, Sistemático de Orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - ☐ Volumen mínimo 10 ml
 - ☐ Observaciones Si se obtiene la orina por cateterización evitar la contaminación con lubricantes.
 - ☐ Contenedor Recipiente específico con cierre impermeable.
 - ☐ Almacenamiento Si el análisis se realiza dentro de las 2 horas posteriores a la recogida del espécimen, no se necesita ningún conservante, en caso contrario, el espécimen debe ser refrigerado.
 - ☐ Tª Ambiente Inestable. pH dependiente
 - ☐ Refrigerado 1-4 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones El espécimen debe ser recolectado preferiblemente de 1 a 3 horas después de evacuar completamente la vejiga. El paciente debe descartar los primeros mililitros y recoger a continuación.

ID. 821 OSMOLALIDAD

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Suero; osmolalidad
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 822 OSMOLALIDAD (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Heces; osmolalidad
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces de 72 h ó muestra al azar
 - Volumen mínimo 10 gramos
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente de plástico prepesado
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 823 OSMOLALIDAD (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Orina; osmolalidad
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 824 OSTEOCALCINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Osteocalcina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 15 minutos
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 14 días
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 825 OXALATO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de oxalato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Oxalato cálcico, Acido oxáico.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico lavado con ácido con 20 mL HCl 6N
 - Almacenamiento En recipiente de plástico lavado con ácido, preferentemente de polietileno, con tapón de plástico.
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado 4 meses
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Evitar el consumo de vitamina C las 24 horas previas a la recolección. La piridoxina puede hacer disminuir la oxaluria.
 - Otras consideraciones

ID. 826 OXIUIROS (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Oxiuros; c.arb.
- ☐ Sinónimos Test de Graham
- ☐ Espécimen Tipo Cinta adhesiva en márgenes del ano
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Dispositivo específico
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 827 PARA AMINOBENZOICO ACIDO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—*p*-Aminobenzoato; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 828 PARASITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema-Parásitos; cont.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 829 PARASITOS (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Parásitos; c.arb. (0;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1-5 g/1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 830 PARATHORMONA INTACTA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Paratirina; c.masa
- ☐ Sinónimos Hormona paratiroidea, PTH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente Si.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar un ejercicio físico fuerte inmediatamente antes de la extracción.

ID. 831 PARVOVIRUS B19 ANTICUERPOS IGG

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra parvovirus B19; c.arb.
- ❑ Sinónimos ..
- ❑ Espécimen Tipo .. Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 832 PARVOVIRUS B19 ANTICUERPOS IGM

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra parvovirus B19; c.arb.
- ❑ Sinónimos ..
- ❑ Espécimen Tipo .. Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 833 PEPTIDO C

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Péptido C; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 834 PEROXIDASA PLAQUETAR TÉCNICA ULTRAESTRUCTURAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Peroxidasa plaquetar; c.arb. || MOs—Peroxidasa plaquetar; c.arb.
- ☐ Sinónimos MPO de plaquetas por MET
- ☐ Espécimen Tipo Sangre o Médula ósea
 - Volumen mínimo 20 ml o 2 mm
 - Observaciones
 - Contenedor Sangre: heparina sódica, médula: líquido conservante heparinizado
 - Almacenamiento No almacenar, llevar inmediatamente al laboratorio
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Médula ósea o sangre preparada
 - Instrucciones almacenaje . No almacenar, procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 835 pH (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Sistema; pH
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Jeringa heparinizada en condiciones anaerobias
 - Almacenamiento No almacenar, remitir inmediatamente al laboratorio
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Líquido bien homogeneizado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 836 pH (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Orina;pH
- ☐ Sinónimos pH urinario.
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Ver espécimen
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 837 PIRIDINOLINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Piridinolina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 838 PIRIDINOLINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Piridinolina; c.sust.
- ☐ Sinónimos Pyd
- ☐ Espécimen Tipo Orina de una micción
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Preferiblemente orina recogida antes de las 10 horas para evitar las variaciones diurnas
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Unas horas
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Varios meses
- ☐ Muestra Tipo Ver espécimen
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar exposiciones prolongadas a la luz solar

ID. 839 PIRUVATO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Piruvato; c.sust.
- ❑ Sinónimos Pirúvico
- ❑ Espécimen Tipo Sangre desproteinizada con á. perclórico en frío.
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones El espécimen debe obtenerse sin torniquete.
 - Contenedor Tubo de vidrio ó plástico
 - Almacenamiento Procesar el espécimen inmediatamente
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Desproteinizado de sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 8 días
 - Congelado 1 mes
- ❑ Preparación Paciente Si
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El paciente deberá estar en completo reposo.

ID. 840 PIRUVATO KINASA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Piruvato-cinasa; c.cat.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre total
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina ó con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 841 PIRUVATO KINASA ERITROCITARIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers—Piruvato-cinasa; act.cat.entfíica
- ☐ Sinónimos PK
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3 o Heparina sódica
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Hemolizado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 15 días. 1 año a -70°C
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 842 PLAQUETAS ESTUDIO DE LIBERACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Liberación plaquetar de serotonina, adenín-nucleótidos, etc.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10-20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con ACD o citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plaquetas lavadas
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 843 PLAQUETAS ESTUDIO MORFOLOGICO EN SANGRE PERIFERICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Plaquetas; taxón(morfológico)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 gota
 - Observaciones Sangre total directa sin anticoagulante/anticoagulada
 - Contenedor Extensión en portaobjetos
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensión
 - Instrucciones almacenaje . Realizar la extensión directa de inmediato
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No realizar la extensión a partir de anticoagulante

ID. 844 PLAQUETAS RECuento

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Plaquetas; c.núm.
- ☐ Sinónimos Recuento de trombocitos. Plaquetas. Trombocitos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones Se realiza en EDTA K3. En algunos casos muy especiales se puede solicitar que el recuento se haga con citrato sódico (tubo de coagulación) o a veces con heparina (en dichos casos consultar)
 - Contenedor Tubo con EDTA K3. En casos especiales: tubo de citrato o heparina
 - Almacenamiento En algunos casos se puede solicitar el recuento de inmediato despues de la extracción.
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 845 PLASMINOGENO ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Plasminógeno antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 12 horas
 - Congelado 7 dias
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 846 PLASMINOGENO FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Plasminógeno funcional;p
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 dias
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 847 PLASMODIUM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y -sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 848 PLOMO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Plomo; c.sust.
- ☐ Sinónimos Pb en sangre.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina o con EDTA que no contenga elementos traza.
 - Almacenamiento 4 horas. Transferir seguidamente a tubos de policarbonato y mantener refrigerado (4° C) 5 días en las condiciones antes expuestas y 60 días si se guarda en tubos de policarbonato.
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 849 PLOMO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Plomo; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Pb en orina
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Acidificar la orina hasta pH 2.0, o menos, con ácido clorhídrico concentrado.
 - Contenedor Recipiente plástico de policarbonato lavado con ácido.
 - Almacenamiento Refrigerar ó congelar para prevenir el crecimiento bacteriano. En estas condiciones es estable indefinidamente.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 850 POLIOVIRUS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra poliovirus; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 851 POLIPEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Polipéptido intestinal vasoactivo; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos VIP
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No almacenar. Llevar el tubo al laboratorio herméticamente cerrado y en baño de hielo. Centrifugar a 4°C y separar el suero lo más rápido posible y congelar.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . A -70° C 3 meses.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 3 meses a -70° C
- ☐ Preparación Paciente Sí.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 852 PORFIRINAS TOTALES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Porfirinas; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Proteger de la luz durante la recolección.
 - Contenedor Recipiente con 5 gramos de carbonato sódico.
 - Almacenamiento Proteger de la luz.
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 853 PORFOBILINOGENO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Porfobilinógeno; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Recoger la orina en períodos asociados con sintomatología clínica.
 - Contenedor recipiente plástico ó vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 854 POTASIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Ión Potasio; c.sust./ Pla—Ión Potasio; c.sust.
- ☐ Sinónimos K sangre, Kaliemia, Potasemia.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina-litio.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 855 POTASIO (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. 72hFae—Ión Potasio;n / Fae—Ión Potasio;n
- ☐ Sinónimos Potasio fecal, K fecal.
- ☐ Espécimen Tipo Heces de 72 h ó muestra al azar.
 - ☐ Volumen mínimo 10 gramos
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Recipiente plástico prepesado.
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Heces 2 ml
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 856 POTASIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Ión Potasio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Potasuria, Kaliuria, K en orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h ó fracción.
 - ☐ Volumen mínimo
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Recipiente plástico ó vidrio
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 45 días
 - ☐ Refrigerado 2 meses
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 857 POTASIO (SEMEN)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. PSe—Ión Potasio; c.sust.
- ☐ Sinónimos K en líquido seminal
- ☐ Espécimen Tipo Semen
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Estable a cualquier temperatura.
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma seminal
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 858 PREALBUMINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Prealbúmina; c.masa
- ☐ Sinónimos Transtiretina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No congelar
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . A -70° C indefinidamente.
 - T° Ambiente 7 días
 - Refrigerado 30 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 859 PRECALICREINA ANTIGENICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Precalicroina antigénica; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 860 PRECALICREINA FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Precalicroina funcional; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 861 PREGNANEDIOL (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Pregnandiol; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Pregnandiol.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h de plastico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 1 mes
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar el ejercicio muscular antes y durante la recogida de la muestra.

ID. 862 PREGNANETRIOL (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Pregnantriol; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Pregnantriol
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar el ejercicio muscular antes y durante la recolección.

ID. 863 PRIMIDONA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Primidona; c.sust.
- ☐ Sinónimos Misolina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina ó con EDTA.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 5 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Evitar la toma de acetazolamida que reduce la absorción gastrointestinal de primidona.
 - Otras consideraciones Para monitorización realizar la toma de la muestra justo antes de la siguiente dosis. En caso de intoxicación, a cualquier hora.

ID. 864 PROCOLAGENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Procolageno; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 865 PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL FIBRINOGENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Productos de degradación del fibrinógeno; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos PDF
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Trombina+agente antifibrinolisis.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No realizar la extracción si el paciente está en tratamiento con heparina.

ID. 866 PROGESTERONA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Progesterona; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar uso de tubos con geles separadores.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 867 PROINSULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proinsulina; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante, preferiblemente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 30 min
 - Refrigerado 1-2 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 12 horas antes de la extracción
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 868 PROLACTINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Prolactina; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos Manotropina, hPRL
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 12 horas previas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 869 PROSTAGLANDINAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
- Observaciones
- Contenedor
- Almacenamiento
- Tª Ambiente
- Refrigerado
- Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
- Tª Ambiente
- Refrigerado
- Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones

ID. 870 PROTEINA BASICA DE LA MIELINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Proteína básica de la mielina; c.masa
- ☐ Sinónimos MBP
- ☐ Espécimen Tipo LCR
- Volumen mínimo 2 ml
- Observaciones
- Contenedor Tubo de plástico ó vidrio.
- Almacenamiento
- Tª Ambiente 4 horas
- Refrigerado 3 días
- Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
- Tª Ambiente
- Refrigerado
- Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones

ID. 871 PROTEINA C ANTIGENICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Proteína C antigénica; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 872 PROTEINA C ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Gen de la Proteína C
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 873 PROTEINA C FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Proteína C funcional; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 874 PROTEINA C REACTIVA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proteína C reactiva; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Separar el suero y refrigerar (4º C)
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 4
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 8 días
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 875 PROTEINA CATIONICA DEL EOSINOFILO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos ECP
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 876 PROTEINA DE BENCE JONES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Proteína de Bence Jones; caudal sust.(24h)
- ☐ Sinónimos Cadenas kappa y lambda en orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento Se puede conservar a -70° C de forma indefinida.
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina concentrada (mínimo 50X)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 877 PROTEINA S ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Gen de la Proteína S
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 878 PROTEINA S FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Proteína S funcional; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 879 PROTEINA S LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Proteína S libre; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 4 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 880 PROTEINA S TOTAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Proteína S total; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 4 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 881 PROTEINA TRANSPORTADORA DE LA IGF

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Proteína transportadora de la IGF; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 28 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 882 PROTEINA TRANSPORTADORA DEL RETINOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proteína enlazante de retinol; c.masa
- ☐ Sinónimos RBP en suero.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 horas
 - Refrigerado 30 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 883 PROTEINA TRANSPORTADORA HORMONA DEL CRECIMIENTO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Proteína transportador hormona del crecimiento; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 28 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 884 PROTEINA UNIDORA DE MANOSA CUANTIFICACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proteína unidora de manosa; c.masa
- ☐ Sinónimos MBP (s)
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 885 PROTEINA UNIDORA DE MANOSA FENOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 886 PROTEINAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proteína; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina-litio.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Se puede conservar a -70º de forma indefinida.
 - Tª Ambiente 6 días
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 887 PROTEINAS (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Proteína; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 1 día
 - Refrigerado 6 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 888 PROTEINAS (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Proteína; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de plástico
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 1 día
 - Refrigerado 6 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 889 PROTEINAS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Proteína;m
- ☐ Sinónimos Proteinuria.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento Se puede conservar a -70° C de forma indefinida.
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No debe obtenerse los especímenes después de un ejercicio intenso.

ID. 890 PROTEINAS BANDAS MONOCLONALES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proteínas bandas monoclonales; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 891 PROTEINAS BANDAS MONOCLONALES (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Proteínas bandas monoclonales; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 2 meses
- ☐ Muestra Tipo Líquidos biológicos
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 2 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 892 PROTEINAS BANDAS MONOCLONALES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Proteínas bandas monoclonales; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 100 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 893 PROTEINAS BANDAS OLIGOCLONALES

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Proteínas bandas oligoclonales; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 894 PROTEINAS BANDAS OLIGOCLONALES (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Proteínas bandas oligoclonales; c.arb.
- ☐ Sinónimos IEE en líquidos biológicos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Líquidos biológicos
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 895 PROTEINAS BANDAS OLIGOCLONALES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Proteínas bandas oligoclonales; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo Toda la orina.
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 896 PROTEINAS DE MEMBRANA ERITROCITA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Electroforesis de proteínas de membrana eritrocitaria
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina sódica
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 6 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extracto de membranas
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 6 horas
 - Congelado 6 meses a -70°C
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 897 PROTEINOGRAMA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Electroforesis de proteína;
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 días
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 898 PROTOPORFIRINA (ERITROCITOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers—Protoporfirina (III);n/N
- ☐ Sinónimos FEP, Protoporfirina eritrocitaria libre.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre capilar
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA si se extrae sangre venosa.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sangre
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 899 PROTOPORFIRINA (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. dFae—Protoporfirina (III);n/N
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces de 24 horas
 - Volumen mínimo 25 gramos
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico prepesado.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 900 PROTOPORFIRINA IX (ERITROCITOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers—Protoporfirina (IX);n/N
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina ó con EDTA ó con oxlato.
 - Almacenamiento Proteger de la luz.
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 901 PRUEBA CRUZADA PARA TRASPLANTE DE ORGANO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Pruebas cruzadas o Cross-match
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Indicar si el paciente ha recibido transfusiones y el tratamiento al que está sometido.

ID. 902 PRUEBA DE COMPATIBILIDAD TRANSFUSIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Pruebas cruzadas para transfusión sanguínea. Pruebas cruzadas
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación de los sueros debe hacerse a 37 °C y procesarlos a continuación
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 903 PRUEBA DE DONATH-LANDSTEINER

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Hemolisima de la Hemoglobinuria paroxística "a frigore".
Hemolisima bifásica.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 x 5 ml
 - Observaciones Se necesitan dos tubos de 5ml de sangre completa
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Extraer a 37 °C y remitir a 37 °C inmediatamente al Banco de sangre.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre
 - Instrucciones almacenaje . Una vez remitida la muestra, procesar de inmediato
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 904 PRUEBA DE FALCIFORMACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Drepanocitos(formados in vivo); c.arb.
- ☐ Sinónimos Test para el diagnóstico de la drepanocitosis. Prueba de la Hb S. Descartar Hb S o A/S.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre total anticoagulada
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 905 PRUEBA DE HEMOLISIS ACIDA. PRUEBA DE HAM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Test del suero acidificado. Test de la hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH).Prueba o Test de Ham
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 8 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con oxalato cálcico o ACD (3 mL) y tubo sin anticoagulante (5mL)
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Hematíes lavados y suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 906 PRUEBA DE HEMOLISIS CUALITATIVA. PINK TEST

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Test cualitativo de hemólisis. Pink test
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 907 PRUEBA DE LA SACAROSA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Test de la sacarosa o sucrosa. Prueba de la HPN. Prueba de la fuerza iónica
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con oxalato cálcico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 908 PRUEBA DE SECRECION DE SUSTANCIAS ABO EN SALIVA (SALIVA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Saliva
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Remitir inmediatamente al Banco de Sangre
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Saliva
 - Instrucciones almacenaje . Hervir inmediatamente y centrifugar
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Enjuagar la boca con salino y posteriormente con agua
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 909 PRUEBA DEL ISOPROPANOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de Hemoglobinas inestables
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3 o Heparina sódica
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 6 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Hemolizado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 6 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 910 PRUEBA DIRECTA DE ANTIGLOBULINA HUMANA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers(San)—Anticuerpo antieritrocítico(unido in vivo); c.arb.("Coombs directo")
- ☐ Sinónimos Prueba directa Coombs, PDAGH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 911 PRUEBA INDIRECTA DE ANTIGLOBULINA HUMANA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el antígeno D; c.arb.("Coombs indirecto")
- ☐ Sinónimos Prueba indirecta de Coombs, PIAGH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelacion de los sueros debe realizarse a 37 °C y procesar inmediatamente
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 912 PRUEBAS DE HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos PHC, pruebas cutaneas
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente Sí
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Deben transcurrir al menos 15 días entre 2 aplicaciones sucesivas.

ID. 913 QUIMOTRIPSINA (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. 72hFac—Quimiotripsina;z/m arb
- ☐ Sinónimos Quimiotripsina en heces, Quimiotripsina fecal, Tripsina inmunorreactiva fecal.
- ☐ Espécimen Tipo Heces de 72 h ó muestra al azar.
 - Volumen mínimo Toda la muestra
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico prepesado.
 - Almacenamiento Mantener refrigerado durante la recogida.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 15 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Evitar la toma de laxantes y contrastes una semana antes del análisis.
 - Otras consideraciones

ID. 914 QUIMOTRIPSINA (JUGO DUODENAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. CDu—Quimiotripsina;b arb
- ☐ Sinónimos Quimiotripsina en jugo duodenal
- ☐ Espécimen Tipo Jugo duodenal
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 915 REABSORCION TUBULAR DE FOSFATOS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Fosfato; caudal sust.(24 h)/Srm—Fosfato; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas y sangre
 - Volumen mínimo Toda la orina y 1 ml
 - Observaciones La sangre (1 mL) debe extraerse el día que se termine de recoger la orina.
 - Contenedor Recipiente orina de 24 horas y tubo seco para sangre
 - Almacenamiento El espécimen de sangre puede mantenerse 1 hora a temperatura ambiente.
 - Tª Ambiente 2 días a pH <5
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Orina y suero
 - Instrucciones almacenaje . El almacenamiento del suero es a temperatura ambiente 1 día, refrigerado 4 días y congelado 1 año.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente Si
 - Ayuno Deberan suprimirse: epinefrina, insulina, hidróxido de aluminio, esteroides anabólicos, hormona de crecimiento y vitamina D.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar el ejercicio antes de la extracción.

ID. 916 RECEPTOR SOLUBLE DE INTERLEUQUINA 2

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Interleucina 2 (receptor soluble); c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos IL-2R soluble, CD25 soluble, IL-2Rs
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 917 RECEPTOR SOLUBLE DE INTERLEUQUINA 6

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Interleucina 6 (receptor soluble); c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 918 RECEPTOR SOLUBLE DE LA INTERLEUKINA II

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Interleucina II (receptor soluble); c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos IL-2R soluble, CD25 soluble, IL-2Rs
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 919 RECEPTOR SOLUBLE DE TNF-P60

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—TNF-P60 (receptor soluble); c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos sTNF R1
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 920 RECEPTOR SOLUBLE DE TNF-P80

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—TNF-P80 (receptor soluble); c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos TNF-p80
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 921 RECEPTORES DE ESTROGENOS (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Prt—Receptor de estradiol;w
- ☐ Sinónimos Receptores de estradiol.
- ☐ Espécimen Tipo Tejido tumor de mama.
 - Volumen mínimo 200 mg
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo ó recipiente de plástico
 - Almacenamiento Congelar inmediatamente. Si se hace a -80° C puede conservarse 15 días.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 922 RECEPTORES DE PROGESTERONA (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Prt—Receptor de progesterona;w
- ☐ Sinónimos Tejido tumoral
- ☐ Espécimen Tipo Tejido tumoral
 - Volumen mínimo 1 gramo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Congelar inmediatamente. Si se hace a -80° C puede conservarse 15 días.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 923 RECuento DIFERENCIAL LEUCOCITARIO AUTOMATIZADO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. San—Entidades leucocíticas; arb.
- ❑ Sinónimos Fórmula leucocitaria automática, Fórmula, diferencial automático
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento Entre 12 y 24 horas dependiendo del tipo de autoanalizador para las subpoblaciones celulares. Las alarmas de serie blanca son estables entre 2 horas (analizadores Sysmex) y 8 horas (Bayer) dependiendo de la tecnología.
 - Tª Ambiente 2 a 8 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ❑ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje . Lo mismo del apartado anterior
 - Tª Ambiente 2 a 8 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 924 RECuento DIFERENCIAL LEUCOCITARIO MANUAL

- ❑ Nomenclatura recomendada .. San—Entidades leucocíticas; arb.
- ❑ Sinónimos Fórmula leucocitaria. RDL manual. Fórmula manual.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 gota
 - Observaciones Si la sangre es con EDTA K3, debe realizarse la extensión antes de las 2 horas de la extracción
 - Contenedor Extensión directa (mejor) o Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento Dejar secar la extensión al aire
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ❑ Muestra Tipo Extensiones
 - Instrucciones almacenaje . Debe teñirse la extensión antes de las 24 horas
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La extensión debe ser bien hecha, sino no es valorable

ID. 925 REDUCCION DEL NITROAZUL DE TETRAZOLIO



- ❑ Nomenclatura recomendada .. ???
- ❑ Sinónimos NAT
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina sódica(tapón verde)
 - Almacenamiento No almacenar, llevar al laboratorio
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 926 RENINA ACTIVIDAD



- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Renina; c.cat.
- ❑ Sinónimos Angiotensina, Renina en plasma, actividad de renina en plasma.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Evitar el uso de heparina como anticoagulante.
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Colocar el tubo con la sangre en baño de hielo y llevar inmediatamente al laboratorio. Centrifugar en centrífuga refrigerada y separar el plasma, inmediatamente congelar.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Puede almacenarse a -70º C durante 1 mes.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 mes
- ❑ Preparación Paciente Sí
 - Ayuno El paciente debe seguir una dieta normosódica (3 g al día).
 - Supresión medicación Durante las tres semanas anteriores a la realización de la prueba se deben suprimir: diuréticos, antihipertensivos, estrógenos y progestágenos cíclicos.
 - Otras consideraciones Los tres días previos a la prueba el paciente debe limitar la ingesta de sodio a 20 mEq/día y se le debe administrar 0.5 mg de clorotiacida dos veces al día durante tres días.

ID. 927 REORDENAMIENTO DE LA CADENA GAMMA DEL RECEPTOR DE LA CELULA T EG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio genético de linfomas T.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre y biopsia de piel
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA y piel en gasa humedecida
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN de sangre y piel
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 928 REORDENAMIENTO DE LAS CADENAS PESADAS DE INMUNOGLOBULINAS EG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio genético de linfomas B
- ☐ Espécimen Tipo Sangre y biopsia de piel
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA y piel en gasa humedecida
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN de sangre y piel
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 929 RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA. FENOTIPO FACTOR V LEIDEN

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Resistencia a la proteína C activada;tr
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 930 RESISTENCIA OSMOTICA ERITROCITARIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. (San)Ers—Resistencia osmótica eritrocitaria; c.arb.
- ☐ Sinónimos ROE
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre total anticoagulada
 - Contenedor Tubo con heparina sódica
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje . Se puede realizar inmediatamente o a las 24 horas
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 931 RESPUESTA A LA ACETATO DE DESMOPRESINA. DDAVP

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 932 RESPUESTA ANTI IDIOTIPICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
- Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 933 RESPUESTA ESPECIFICA A VACUNAS, HAEMOPHILUS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Vacunas
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Se extraerá una muestra previa a la inmunización y otra muestra cuando hayan transcurrido 1-2 meses

ID. 934 RESPUESTA ESPECIFICA A VACUNAS, NEUMOCOCO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Vacunas
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 30 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Se extraerá una muestra previa a la inmunización y otra muestra cuando hayan transcurrido 1-2 meses

ID. 935 RESPUESTA ESPECIFICA A VACUNAS, TOXOIDE TETANICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Vacunas
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 30 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Se extraerá una muestra previa a la inmunización y otra muestra cuando hayan transcurrido 1-2 meses

ID. 936 RETICULOCITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Reticulocitos; c.núm.
- ☐ Sinónimos Retis
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Los reticulocitos pueden realizarse por varios métodos: manuales, semiautomáticos y automáticos.
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 937 RICKETTSIA CONNORI ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Rickettsia connori; c.arb.
- ☐ Sinónimos ..
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 938 RIFAMPICINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Rifampicina; c.sust.Pla—Rifampicina
- ☐ Sinónimos ..
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero/Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 939 RIFAMPICINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Rifampicina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 940 ROTAVIRUS, DETECCION (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Rotavirus; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1-5 g/1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 941 RUBEOLA ANTICUERPOS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra Rubeola; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 942 RUBEOLA ANTICUERPOS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra Rubeola; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 943 S-100 PROTEINA BETA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 944 SACAROSA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Sacarosa; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con solución ACD
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Si
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 945 SALICILATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Salicilato; c.sust.
- ☐ Sinónimos Aspirina, Acido acetilsalicílico, Acido salicílico, Salicilato sódico, Salicilatos.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Recolectar la sangre justo antes de la siguiente dosis. En caso de sobredosis, los especímenes deben ser recolectados tan pronto como sea posible y como máximo 6 horas después

ID. 946 SALMONELLA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Salmonella; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4º C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 947 SECOBARBITAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Secobarbital; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 6 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco sin gel separador
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 meses
 - Refrigerado 6 meses
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 948 SECRECION ACIDA BASAL Y MAXIMA (JUGO GASTRICO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. CGa-Secreción ácida basal y máxima;pH
- ☐ Sinónimos Prueba de estimulación gástrica con pentagastrina, BAO, MAO.
- ☐ Espécimen Tipo Contenido gástrico
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado 3 días
- ☐ Muestra Tipo Contenido gástrico
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente Toda una noche
 - Ayuno El paciente puede tomar agua hasta 1 hora antes de la prueba, pero debe abstenerse de fumar al menos 72 horas antes de la prueba.
 - Supresión medicación El paciente debe abstenerse de tomar antiácidos y cualquier medicación (cimetidina, anticolinérgicos ó antidepresivos tricíclicos) que puedan alterar la secreción gástrica, al menos 72 horas antes de la prueba.
 - Otras consideraciones La intubación gástrica está contraindicada en pacientes con aneurisma aórtico, insuficiencia cardíaca congestiva ó varices gástricas.

ID. 949 SEDIMENTO MINUTADO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. (Uri)Sedimento—Eritrocitos; c.arb.(0;3)/(Uri)Sedimento—Leucocitos; c.arb;caudal sust.(12h)minutado
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 12 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 950 SEDIMENTO URINARIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. (Uri)Sedimento-Eritrocitos; c.arb.(0;3)/(Uri)Sedimento-Leuco
- ☐ Sinónimos Urinálisis. Examen microscópico de la orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Si la orina se obtiene por cateterización evitar la contaminación por lubricantes.
 - Contenedor Recipiente específico con cierre impermeable.
 - Almacenamiento Si el análisis se realiza dentro de las 2 horas previas a la recogida del espécimen, no se necesita ningún conservante, en caso contrario, el espécimen debe ser refrigerado o añadirle un conservante, pueden usarse los siguientes: a).2 mL de tolueno, b).1 cristal de timol por cada 10 mL de orina, c).Tabletas comerciales liberadoras de formaldehído, metenamina, benzoato y óxido de mercurio (1 tableta aumenta 0.002 unidades la densidad de 20 mL de orina), d).Formalina al 40% (interfiere con la esterasa leucocitaria y substancias reductoras). Con conservantes la conservación a 25° C y 4° C es de 24 h, si es la siguiente:
pH>7,5—>1 hora
pH<6,5—>24 horas
- Tª Ambiente Dependiendo del Ph
 - Refrigerado 1-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sedimento de 10 ml de orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1-4 horas
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El espécimen debe ser recolectado preferiblemente de 1 a 3 horas después de evacuar completamente la vejiga. El paciente debe descartar los primeros mililitros y recoger a continuación entre 15 y 50 mL. Si fuera necesario el espécimen puede obtenerse por cateterización.

ID. 951 SELENIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—selenio; c
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Especial para elementos traza
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 semana
 - ☐ Refrigerado 2 semanas
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 952 SELENIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—selenio; c
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - ☐ Volumen mínimo 10 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Especial para elementos traza
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina recogida con 20ml de NO3H 6N
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 953 SEMINOGRAMA INFERTILIDAD ESTUDIO (SEMEN)

☐ Nomenclatura recomendada ..	Pac—Espermatozoides(eyaculado);n
☐ Sinónimos	
☐ Espécimen Tipo	Semen
▪ Volumen mínimo	Todo el eyaculado
▪ Observaciones	El mejor método para la recolección del fluido seminal es por masturbación en un recipiente de polipropileno esteril con tapón también de polipropileno.
▪ Contenedor	Polipropileno
▪ Almacenamiento	Debe mantenerse a 37 ° C y analizarse antes de 1 hora despues de la recolección.
▪ Tª Ambiente	No
▪ Refrigerado	No
▪ Congelado	No
☐ Muestra Tipo	Semen
▪ Instrucciones almacenaje .	
▪ Tª Ambiente	
▪ Refrigerado	
▪ Congelado	
☐ Preparación Paciente	Periodo de abstinencia 3 días
▪ Ayuno	
▪ Supresión medicación	
▪ Otras consideraciones	

ID. 954 SEMINOGRAMA POSTVASECTOMIA (SEMEN)

☐ Nomenclatura recomendada ..	Sem—Espermatozoides; c.núm.
☐ Sinónimos	
☐ Espécimen Tipo	Semen
▪ Volumen mínimo	Todo el eyaculado
▪ Observaciones	
▪ Contenedor	Recipiente de polipropileno
▪ Almacenamiento	
▪ Tª Ambiente	No
▪ Refrigerado	No
▪ Congelado	No
☐ Muestra Tipo	Semen
▪ Instrucciones almacenaje .	
▪ Tª Ambiente	No
▪ Refrigerado	No
▪ Congelado	No
☐ Preparación Paciente	No
▪ Ayuno	
▪ Supresión medicación	
▪ Otras consideraciones	

ID. 955 SENSIBILIDAD A ANTIFUNGICOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo No procede
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor No procede
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 956 SENSIBILIDAD A ANTIVIRICOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo No procede
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor No procede
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 957 SEROTONINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Serotonina; c.sust.
- ☐ Sinónimos 5-Hidroxitriptilina, 5-HT
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Separar el plasma dentro de las 4 horas siguientes a la extracción.
 - Contenedor Tubo con EDTA ó con EDTA/ácido ascórbico.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 36 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente Sí
 - Ayuno Algunos métodos de análisis de la serotonina requieren que los pacientes cumplan durante varios días previos a la extracción del espécimen una dieta baja en indoles (evitar plátanos, tomates, aguacates y berenjenas).
 - Supresión medicación Una semana antes de la extracción del espécimen suprimir la ingesta de drogas inhibidoras de la monoamina oxidasa, para evitar falsos incrementos de la serotonina.
 - Otras consideraciones

ID. 958 SEROTONINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Serotonina; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Ver 5 HIDROXIINDOLACETICO (5HIAA) – Ficha n.º 8
Metabolito de excrección de la serotonina es el 5HIAA.
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 959 SEUDOCOLINESTERASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Colinesterasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos Pseudocolinesterasa, CHE.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 17 días
 - Refrigerado 17 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 960 SEUDOCOLINESTERASA ATÍPICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Colinesterasa atípica; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 17 días
 - Refrigerado 17 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 961 SINDROME DE ATAXIA TELANGECTASIA ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Mutaciones-delecciones del gen AT
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 962 SINDROME DE ATAXIA TELANGECTASIA ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Mutaciones-delecciones del gen AT
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 963 SINDROME DE DOWN ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 964 SINDROME DE DOWN ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 965 SINDROME DE WISKOTT-ALDRICH ESTUDIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Afectación del CD43 y Mutaciones-delecciones
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Leucocitos aislados y ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas y 1 semana
 - Congelado No procede e Indefinidame
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 966 SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGIL ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Síndrome X frágil, X-FRA; estudios del número de tripletes CGG de la región FMR-1 (FRAX-A), estudio de la región FMR-2 (FRAX-E).
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 967 SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGIL ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Síndrome X frágil, X-FRA; estudios del número de tripletes CGG de la región FMR-1 (FRAX-A), estudio de la región FMR-2 (FRAX-E).
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - ☐ Volumen mínimo 4 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo truncado estéril
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado No procede
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 968 SODIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Ión Sodio; c.sust.
- ☐ Sinónimos Ion sodio en suero, Sodemia, Natremia, Na+ en suero.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente Días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 semanas
 - ☐ Refrigerado 2 semanas
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 969 SODIO (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. 72hFae—Ión Sodio;n
- ☐ Sinónimos Na+
- ☐ Espécimen Tipo Heces de 72 h
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico prepesado.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 970 SODIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Ión Sodio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Ion sodio en orina, Natriuria, Na+ en orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda o una fracción
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 45 días
 - Refrigerado 45 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 971 SODIO (SEMEN)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pse—Ión Sodio; c.sust.
- ☐ Sinónimos Na+
- ☐ Espécimen Tipo Semen
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Estable a cualquier temperatura
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma seminal
 - Instrucciones almacenaje . Estable a cualquier temperatura.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 972 SOMATOSTATINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Somatostatina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Centrifugar a 4°C inmediatamente y congelar.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 973 SOMATOSTATINA (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Somatostatina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido cefalorraquídeo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 974 STREPTOCOCCUS NEUMONIAE ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Streptococcus pneumoniae; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida del suero.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 975 SULFOMETOXAZOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Sulfometoxazol; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 976 SULFONILUREA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Sulfonilurea; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 977 TACROLIMUS FK-506

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Tacrolimus (FK-506); c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 978 TEICOPLAMINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Teicoplanina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Consignar hora de la toma de la muestra y hora de la última dosis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Separar el suero dentro de la hora siguiente a la extracción.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La extracción valle debe realizarse inmediatamente antes de la siguiente dosis. Tras la administración intravenosa el pico en suero se obtiene al cabo de 1 ó 2 horas.

ID. 979 PRUEBA ANULADA

- ❑ Nomenclatura recomendada ..
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
- Observaciones
- Contenedor
- Almacenamiento
- Tª Ambiente
- Refrigerado
- Congelado
- ❑ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
- Tª Ambiente
- Refrigerado
- Congelado
- ❑ Preparación Paciente
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones

ID. 980 TEOFILINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Teofilina; c.sust.Pla—Teofilina; c.sust.
- ❑ Sinónimos Aminofilina
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
- Volumen mínimo 1 ml
- Observaciones
- Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con EDTA ó con heparina.
- Almacenamiento
- Tª Ambiente ?
- Refrigerado
- Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero o plasma
- Instrucciones almacenaje .
- Tª Ambiente 12 semanas
- Refrigerado 12 semanas
- Congelado 3 meses
- ❑ Preparación Paciente No
- Ayuno
- Supresión medicación
- Otras consideraciones La recolección del espécimen debe hacerse justo antes de la siguiente dosis oral, en la concentración de "steady state" durante la 4ª administración, ó 30 minutos después de completar la 4ª dosis.

ID. 981 TEST DE LIBERACION DE HISTAMINA AL ALERGENO QUE SE SOLICITE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Basófilos(San)—Liberación de histamina inducida por....; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo Ver OBSERVACIONES
 - Observaciones Depende de los alérgenos.
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre con heparina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Sin tomar medicación 15 días antes.

ID. 982 TESTOSTERONA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Testosterona; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días y 1 día en mujeres
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 983 TESTOSTERONA (SALIVA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Slv—Testosterona;n
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Saliva
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Saliva
 - Instrucciones almacenaje . Guardar la muestra congelada en hielo seco.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No se requiere
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 984 TESTOSTERONA ESTIMULACION CON CORIOGONADOTROPINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Testosterona (estimulación con coriogonadotropina); c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días y 1 día en mujeres
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 985 TESTOSTERONA LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Testosterona libre; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días y 1 día en mujeres
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 986 TIEMPO DE HEMORRAGIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Tiempo de Hemorragia (IVY);tr
- ☐ Sinónimos Tiempo de hemorragia
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No efectuar si el número de plaquetas es inferior a 50.000 mm3 ó si el paciente está tomando AAS ó analgésicos no esteroideos.

ID. 987 TIEMPO DE PROTROMBINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Tiempo de protrombina;tr
- ☐ Sinónimos TP ó Tiempo de Quick.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Si se va a extraer sangre para otros test, el tubo para la coagulación colocarlo el último. Se deben evitar los bucles de heparina y las vías heparinizadas, si hay que utilizarlas desechar los primeros 20 mL de sangre antes de realizar la extracción para el T.P. Si el paciente está en tratamiento con heparina extraer la sangre 4 horas después de la última inyección.

ID. 988 TIEMPO DE REPTILASE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Tiempo de reptilase;tr
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento Poner el tubo en un recipiente con hielo y llevar inmediatamente al laboratorio. Centrifugar a 4° C.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Si se van a extraer sangre para otros test, el tubo para la coagulación colocarlo el último.

ID. 989 TIEMPO DE TROMBINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Tiempo de trombina;tr
- ☐ Sinónimos TT
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento Poner el tubo en un recipiente con hielo y llevar inmediatamente al laboratorio. Centrifugar a 4° C.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Si se van a extraer sangre para otros test, el tubo para la coagulación colocarlo el último. No realizar a pacientes sometidos a terapia heparínica.

ID. 990 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA. TTPA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Tiempo de tromboplastina parcial;tr
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 2 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No realizar a pacientes sometidos a terapia heparínica.

ID. 991 TIMIDINA KINASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Timidina-cinasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 992 TIOCIANATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Tiocianato; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 993 TIOCIANATO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Tiocianato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina de 24h
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 994 TIROGLOBULINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Tiroglobulina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 5 días
 - Refrigerado 5 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Evitar scanner u otras administraciones de radioisótopos.

ID. 995 TIROSINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Tirosina; c
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 1 hora
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente Si
 - Ayuno Niños 4 horas de ayuno y adultos 12 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 996 TIROSINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de tirosina; c
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Añadir 20 ml de tolueno al recipiente al comenzar la recogida de la orina.
 - Contenedor Recipiente de cristal o plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 7 días
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 997 TIROXINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Tiroxina; c.sust.
- ❑ Sinónimos Tiroxina total, T4, TT4
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre total en papel de filtro para el screening neonatal.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ❑ Preparación Paciente Sí.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 998 TIROXINA LIBRE

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Tiroxina (no unida a proteína); c.sust.
- ❑ Sinónimos T4 libre, FT4, Índice T4 libre, Índice FT4, FT4I.
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ❑ Preparación Paciente Sí.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 999 TOBRAMICINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Tobramicina; c.sust.Pla—Tobramicina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Se recomienda separar el suero dentro de la primera hora después de la toma del espécimen
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación Si la medicación se administra por vía intravenosa, la concentración pico se obtiene a los 30 minutos después de finalizar la infusión; la concentración valle se obtiene inmediatamente antes de la siguiente dosis.
 - Otras consideraciones

ID. 1000 TOBRAMICINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Tobramicina; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina de 24h
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1001 TOXINA BOTULINICA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la toxina botulínica; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. antibotulínica
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1002 TOXINA DIFTERICA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la toxina diftérica; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. antidiftérica
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1003 TOXINA TETANICA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la toxina tetánica; c.arb.
- ☐ Sinónimos Ac. Tétanos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1004 TOXOCARA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra toxocara; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1005 TOXOPLASMA ANTICUERPOS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra toxoplasma; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1006 TOXOPLASMA ANTICUERPOS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra toxoplasma; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1007 TRANSFERRINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Transferrina; c.masa
- ☐ Sinónimos Siderofilina
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 días
 - Refrigerado 8 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Sí.
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1008 TRANSFERRINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de transferrina; caudal masa(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente para orina 24 h
 - Almacenamiento Ajustar el pH a 7. Se recomienda analizar inmediatamente.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1009 TRANSFERRINA INDICE DE SATURACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Saturación de transferrina;x????
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 días
 - Refrigerado 8 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Si
 - Ayuno Si
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1010 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Anticuerpo contra treponema pallidum; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo LCR centrifugado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1011 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS CONFIRMACION. FTA-TPHA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Treponema Pallidum; c.arb. (0;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida del suero.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1012 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS DESPISTAJE. RPR-VDRL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra treponema pallidum; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1013 TRICHINELLA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Trichinella; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1014 TRIGLICERIDOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Triglicérido; c.sust.
- ☐ Sinónimos Triacilgliceroles, Grasa neutra, TG.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente 12-14 horas previas
 - Ayuno Se puede tomar agua durante el ayuno. Idealmente, el paciente debería hacer una dieta estable 3 semanas antes de la toma del espécimen.
 - Supresión medicación No consumir alcohol en las 72 horas previas a la toma de espécimen.
 - Otras consideraciones

ID. 1015 TRIGLICERIDOS (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Triglicéridos; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido Biológico
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA o heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Años
- ☐ Muestra Tipo Líquido biológico
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1016 TRIGLICERIDOS DE HDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Triglicéridos de lipoproteínas de alta densidad; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA o heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente 12-14 horas de ayuno
 - Ayuno Se puede tomar agua durante el ayuno. Idealmente el paciente tendrá una dieta estable 3 semanas antes de la extracción.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No consumirá alcohol en las 72 horas previas a la toma del espécimen.

ID. 1017 TRIGLICERIDOS DE LDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Triglicéridos de lipoproteínas de baja densidad; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA o heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente Ayuno 12 a 14 horas
 - Ayuno Se puede tomar agua durante el ayuno. Idealmente el paciente mantendrá una dieta estable 3 semanas antes de la extracción.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No consumirá alcohol en las 72 horas previas a la toma del espécimen.

ID. 1018 TRIGLICERIDOS DE VLDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Triglicéridos de lipoproteínas de muy baja densidad; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA o heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente Ayuno 12 a 14 horas previas
 - Ayuno Se puede tomar agua durante el ayuno. Idealmente el paciente debería hacer una dieta estable 3 semanas antes de la toma del espécimen.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No consumirá alcohol en las 72 horas previas a la toma del espécimen.

ID. 1019 TRIIODOTIRONINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Triiodotironina; c.sust.
- ☐ Sinónimos T3
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 8 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1020 TRIIODOTIRONINA INVERSA. T3 REVERSE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Triiodotironina inversa; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 14 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1021 TRIIODOTIRONINA LIBRE. T3 LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Triiodotironina (libre); c.sust.
- ☐ Sinónimos T3 libre
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente Inestable
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado 14 días
 - ☐ Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1022 TRIPSINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Tripsina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente ?
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 7 días
 - ☐ Refrigerado 3 meses
 - ☐ Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1023 TRIPSINA (CONTENIDO DUODENAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. CDu—Tripsina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Contenido duodenal
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Contenido duodenal
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1024 TRIPSINA (ESPUTO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Spu—Tripsina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Esputo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente de plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1025 TRIPSINA (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Tripsina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la muestra
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1026 TRIPTASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Triptasa;b
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado Varios meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1027 TROPONINA I

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Troponina I; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1028 TROPONINA T

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Troponina T; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1029 URATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Urato; c.sust.
- ☐ Sinónimos Acido úrico en suero ó plasma, Uratos en suero ó plasma.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con heparina.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1030 URATO (L.SINOVIAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lsi—Urato; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido sinovial
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Líquido sinovial
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1031 URATO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Urato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Acido úrico en orina, Uratos en orina.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje . Inestable. Si se alcaliniza, tiene una estabilidad de 4 días.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1032 UREA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Urea; c.sust.
- ☐ Sinónimos Nitrógeno ureico en suero ó plasma, BUN en suero ó plasma.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Evitar el uso de fluoruro sódico ó de heparina amónica como anticoagulantes, ya que inhiben la ureasa, si éste fuera el método de determinación de urea.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante ó con EDTA ó con heparina.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1033 UREA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de urea; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1034 UROCULTIVO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Unidades formadoras de colonias; c.arb. (0;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina micción media
 - Volumen mínimo 1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1035 UROPORFIRINAS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de uroporfirinas; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Proteger de la luz. Recoger con 5g de carbonato Na
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 4 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente no
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1036 VALPROATO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Valproato; c.sust.
- ☐ Sinónimos Depakine, Acido N-dipropilAnticuerposético.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones La dosis tiene que ser estable al menos durante los 2 días previos al análisis. Realizar la extracción inmediatamente antes de la siguiente dosis.

ID. 1037 VANADIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Vanadio; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo especial para elementos traza con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1038 VANADIO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de vanadio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina de 24h
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente especial para elementos traza
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 3 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1039 VANCOMICINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Vancomicina; c.sust..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 5 ml
 - ☐ Observaciones Consignar hora de toma de la muestra y hora de la última dosis.
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento Separa el suero dentro de la hora siguiente a la extracción.
 - ☐ T° Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje ..
 - ☐ T° Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado 4 semanas
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones La extracción valle debe realizarse inmediatamente antes de la siguiente dosis. Tras la administración intravenosa el pico en suero se obtiene al cabo de 1 ó 2 horas.

ID. 1040 VANILMANDELICO ACIDO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de 4Hidroxi-3-metoximandelato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos VAM, AVM, Acido 3-Metoxi-4-hidroximandélico.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones Proteger de la luz. Consignar la diuresis.
 - ☐ Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCL 6 A. ácido concentrados
 - ☐ Almacenamiento Ajustar a pH 3-5 con CIH o Acido Acético concentrados.
 - ☐ T° Ambiente 7 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado Años
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - ☐ Instrucciones almacenaje ..
 - ☐ T° Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno Si se utiliza el método de Pisano, durante la recogida de la orina suprimir de la dieta: plátano, nueces, helado, chocolate, café, te, cítricos. Estos alimentos no producen interferencias con los métodos cromatográficos y espectrográficos.
 - ☐ Supresión medicación Dos semanas antes suspender: ácido acetil salicílico, disulfirán, levodopa, reserpina, piridixolina. La amoxicilina interfiere en los métodos cromatográficos. Los inhibidores de la MAO, la reserpina y la insulina aumentan la excreción, la iproniacida, morfina, clorpromacina y fenobarbital la disminuyen.
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1041 VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGG

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra varicela Zoster; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - T° Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1042 VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGM

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra varicela Zoster; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - T° Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1043 VASOPRESINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Vasopresina; c.masa
- ☐ Sinónimos ADH, AVP, Hormona antidiurética
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Poner en baño con hielo y llevar inmediatamente al laboratorio. Centrifugar a 4° C antes de 15 minutos después de la extracción.
 - Contenedor Tubo con EDTA o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Congelado a -70° C la muestra se mantiene 1 mes.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1044 VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Eritrosedimentación;I
- ☐ Sinónimos V.S., V.S.G.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1,8 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico de VSG (0,106 M, 1/4)
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El tubo debe estar muy bien enrasado, sino será rechazado

ID. 1045 VIGABATRINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Vigabatrina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1046 VIH ANTICUERPOS ANTI P-24

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra P-24 del virus de la inmunodeficiencia humana;c arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
- Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1047 VIH ANTICUERPOS CONFIRMATORIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra VIH; c.arb.
- ☐ Sinónimos Western Blot VIH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1048 VIH ANTICUERPOS DESPISTAJE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra VIH; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1049 VIH ANTIGENO P24

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Antígeno VIH P-24; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1050 VIH CARGA VIRAL

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—DNA del virus de la inmunodeficiencia humana; c.sust.arb.
- ❑ Sinónimos Viremia cuantitativa, Carga vírica VIH
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Separar el plasma lo antes posible.
 - Contenedor Tubo con EDTA, si es posible en tubo con separador
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Congelación a -70°C
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1051 VIH DNA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—DNA del virus de la inmunodeficiencia humana; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Congelación a -70°C
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1052 VIRUS DE LA PAROTIDITIS ANTICUERPOS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra el virus de la parotiditis; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1053 VIRUS DE LA PAROTIDITIS ANTICUERPOS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo(IgM) contra el virus de la Parotiditis; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Se recomienda descongelar a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasa en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1054 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO DETECCION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Virus del papiloma humano; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos o tejidos
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente específico
 - Almacenamiento Congelación -70°C
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1055 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO GENOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos o tejidos
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente específico
 - Almacenamiento Congelación a -70°C
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1056 VIRUS GRIPAL A ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus de la gripe A; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1057 VIRUS GRIPAL B ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus gripal B; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1058 VIRUS HTLV-1 ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus HTLV-1; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1059 VIRUS PARAINFLUENZA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus parainfluenza; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1060 VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus respiratorio sincital; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1061 VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL ANTIGENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Antígeno del virus respiratorio sincital; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos o tejidos.
 - ☐ Volumen mínimo
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Dispositivo específico o recipiente estéril.
 - ☐ Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar.
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1062 VIRUS SARAMPION ANTICUERPOS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo(IgG) contra el virus del sarampión; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 5 ml
 - ☐ Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4-5 horas
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - ☐ Tª Ambiente 4-5 horas
 - ☐ Refrigerado 4-5 días
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1063 VIRUS SARAMPION ANTICUERPOS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus del sarampión; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - T° Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1064 VISCOSIDAD PLASMATICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Viscosidad plasmática; c.arb.
- ☐ Sinónimos Viscosidad, VP
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1065 VISCOSIDAD SANGUINEA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Viscosidad sanguínea; c.arb.
- ☐ Sinónimos Viscosidad sanguínea
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1066 VITAMINA A

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Retinol; c.sust.
- ☐ Sinónimos Retinol
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 2 años
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1067 VITAMINA B1

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Vitamina B1; c.sust.
- ☐ Sinónimos Tiamina
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco o con EDTA o Heparina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente ?
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente ?
 - ☐ Refrigerado ?
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1068 VITAMINA B1 (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Vitamina B1; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina de 24
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente Inestable
 - ☐ Refrigerado Inestable
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1069 VITAMINA B12

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cobalaminas; c.sust.
- ☐ Sinónimos Cianocobalamina. Vit B12
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones No utilizar nunca heparina (que liga a la vitamina B12) ni fluoruro.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Es una prueba muy sensible
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 15 minutos
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 8 semanas
- ☐ Preparación Paciente Sí, aconsejable.
 - Ayuno
 - Supresión medicación Suprimir ácido ascórbico si se va a utilizar radioinmunoensayo como técnica de análisis, no se debe realizar la extracción en pacientes que hayan recibido radioisótopos con fines diagnósticos o terapéuticos.
 - Otras consideraciones Período de 4 semanas sin transfusiones.

ID. 1070 VITAMINA B6

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Riboflavina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 30 minutos
 - Refrigerado Horas
 - Congelado Días
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1071 VITAMINA C

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Ascorbato; c.sust.
- ☐ Sinónimos Acido ascóxico, Vitamina C.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 5 ml
 - ☐ Observaciones Proteger de la luz.
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante, con heparina ó con EDTA
 - ☐ Almacenamiento Centrifugar rápidamente y separar el suero en tubo de plástico.
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 3 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje . Sólo con estabilizador Metafosfato 63 mg/ml desproteinizado
 - ☐ Tª Ambiente ?
 - ☐ Refrigerado 3 horas
 - ☐ Congelado 3 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno La noche previa.
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1072 VITAMINA D. 1,25 DIHIDROXIVITAMINA D

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—1,25 coledalciferol; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco o con EDTA, heparina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 3 días
 - ☐ Refrigerado ?
 - ☐ Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Suero o Plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado ?
 - ☐ Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno Sí
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 1073 VITAMINA D. 25 HIDROXIVITAMINA D

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Vitamina D;pla-Vitamina D; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA, Heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Si
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1074 VITAMINA E

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Alfa tocoferol(vit E)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco proteger de la luz
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno La noche anterior
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1075 VITAMINA E-LDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—alfatocoferol(LDL); c.sust.Pla—alfatocoferon(LDL); c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco proteger de la luz o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1076 VITAMINA K

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Filoquinona; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 6 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con heparina de litio
 - Almacenamiento Inestable
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado Inestable
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1077 XANTINA OXIDASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Xantina-oxidasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje ..
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1078 YERSINIA ENTEROCOLITICA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Yersinia enterocolítica; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .. La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1079 YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS ANTICUERPOS

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra la yersinia pseudotuberculosis; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe realizarse a 4° C.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las últimas 6-8 horas.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1080 ZINC

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Zinc (II); c.sust.
- ❑ Sinónimos Zn
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo especial para elementos traza
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 30 minutos
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 1 año
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno Sí
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1081 ZINC (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Zinc(II); c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Especial para elementos traza
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1082 ZINC (SALIVA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Slv—Zinc(II); c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Saliva
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Especial para elementos traza
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Saliva
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 1083 ZINC (SEMEN)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. PSe—Zinc (II); c.sust.
- ☐ Sinónimos Zn
- ☐ Espécimen Tipo Semen
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente especial para elementos traza
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 30 minutos
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma seminal.
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones